

ALFESS[™] Funktionellt Elektriskt Stimulerings System



a | ALFESS™ FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ är en modern enhet för Funktionell Elektrisk Stimulering (FES). Denna innovativa och väl designade ortos är ett komplement till Allard AFO produktserien. ALFESS™ är avsedd att förbättra gång hos personer som saknar möjligheten till att lyfta foten fritt under gång. Den elektriska stimuleringen hjälper foten att aktivt dorsal-flektera. Denna innovation är ett samarbete mellan Camp Scandinavias produktutvecklingsteam och tillverkaren som gett oss en helt unik, funktionell och mest av allt användarvänlig ortos.



Indikationer:

Centrala nervskador som:

Multipel Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP) Inkompleta ryggmärgsskador, Traumatiska hjärnskador.

Funktioner och fördelar

- Kan appliceras med en hand
- Låg vikt
- Diskret under kläder
- Enkel att programmera på enhet, handkontroll eller i mobilapp
- Integrerade elektroder (behöver inte beställa extra)
- En enhet - en storlek - enkelt att beställa
- Möjligt att gå barfota
- Vattenresistent (kort tid)
- Två aktivitetsinställningar: Gång & Träning
- Laddenhet för laddning av integrerat batteri

Kontraindikationer:

Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defibrillator och högfrekvens medicinsk utrustning. FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi. Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen. För mer information om försiktighetsåtgärder och varningar, var vänlig läs användarinstruktionen.

a

ALFESS™ FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ placeras på benet strax under knäet. Under gång känner sensorerna av hastighet och vinklar och anpassar sig till gångmönstret. En algoritm sammanställer informationen och skickar ut elektriska impulser till nerverna så att foten lyfts. Användaren kan enkelt på egen hand justera hur mycket stimulering som är önskad. Träningsläge kan hjälpa brukaren att genomföra sin rehabilitering tillsammans med en Fysioterapeut eller efter givna instruktioner på egen hand.



Art.nr.	Modell	Storlek
282700000	ALFESS™ Komplet	En storlek
282710000	Förlängningsband	En storlek
282720000	Nätadapter EU	En storlek
282730000	Nätadapter UK	En storlek
282740000	Extra kabel fjärrkontroll	En storlek
282750000	Extra laddningskabel för ALFESS	En storlek
282770000	Fjärrkontroll	-
282790000	Extra D-ring med Magnet	En storlek
282820000	Alfess NFR	En storlek
282830000	Connect Gel	500 ml
282840011	A - cover, kosmetiskt textilöverdrag i beige	Small, 28-35 cm
282840012	A - cover, kosmetiskt textilöverdrag i beige	Medium, 34-44 cm
282840013	A - cover, kosmetiskt textilöverdrag i beige	Large, 43-56 cm



Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09 350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

UK/Ireland
42 932 8177
info@allarduk.co.uk
allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
info@allardusa.com
allardusa.com

International
42 25 27 01
info@allardint.com
allardint.com