


# 39330/39333 I/39335/39336 Handske 39340 Ärm Vägledning till måttagning

elements  
body

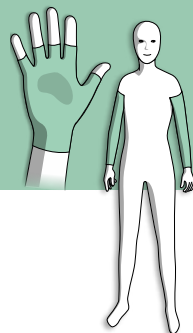


Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. Alla mått skall tas när patienten är liggande, är avslappnad och har normalt andningsmönster. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning. Kort ärm är upp till under armbågen.

## Handske

- L/R30 Tumme: Omkrets MCP led
- L/R31 Tumme: Omkrets distal led, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R32 Pekfinger: Omkrets proximal led, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R33 Pekfinger: Omkrets distal led, eller där handskens finger skall sluta på långt finger
- L/R34 Långfinger: Omkrets proximal led, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R35 Långfinger: Omkrets distal led, eller där handskens finger skall sluta på lång finger
- L/R36 Ringfinger: Omkrets proximal led, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R37 Ringfinger: Omkrets distal led, eller där handskens finger skall sluta på lång finger
- L/R38 Lillfinger: Omkrets proximal led, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R39 Lillefinger: Omkrets distal led, eller där handskens finger skall sluta på lång finger
- L/R40 Omkrets handflatan vid tumbasen, flat hand
- L/R41 Omkrets vid knogarna på handske utan fingrar, där den skall sluta
- L/R42 Tumme: Längd från MCP till där handskens finger skall sluta
- L/R43 Pekfinger: Från basen av fingret till proximala leden, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R44 Pekfinger: Från basen av fingret till där handskens finger skall sluta på långt finger
- L/R45 Långfinger: Från basen av fingret till proximala leden, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R46 Långfinger: Från basen av fingret till där handskens finger skall sluta på långt finger
- L/R47 Ringfinger: Från basen av fingret till proximala leden, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R48 Ringfinger: Från basen av fingret till där handskens finger skall sluta på långt finger
- L/R49 Lillfinger: Från basen av fingret till proximala leden, eller där handskens finger skall sluta på kort finger
- L/R50 Lillefinger: Från basen av fingret till där handskens finger skall sluta på långt finger

# 39330/39333 I/39335/39336 Handske 39340 Ärm Vägledning till måttagning

elements  
body

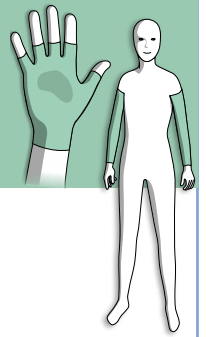

- L/R51      Handske med fingrar: Från tumbasen till basen av pekfingeret  
             Handske utan fingrar: Från tumbasen till där handsken slutar
- L/R52      Handske med fingrar - Från handled till mellanrummet mellan pek- och långfinger  
             Handske utan fingrar - Från handleden till där handsken slutar
- L/R53      Handske med fingrar - Från handleden till mellanrummet mellan ring- och lillfinger  
             Handske utan fingrar - Från handleden till där handsken slutar (på ulnarsidan)
- L/R55      Handleden

## Handske kort och lång, ÄRM

- L/R54      Långt ärm - Handled till armbåge  
             Kort ärm - Handled till änden av plagget
- L/R55      Lång ärm - Handled  
             Kort ärm - Handled
- L/R56A     Lång ärm - Underarmens tjockaste punkt  
L/56B      Kort ärm - Mellan handled och änden av plagget
- L/R57      Lång ärm - Armbågen  
             Kort ärm - Änden av plagget
- L/R58      Lång ärm - Armbågen till änden av plagget
- L/R59      Lång ärm - Mellan armbågen och änden av plagget
- L/R60      Lång ärm - Änden av plagget