


39310 DRÄKT

Vägledning till måttagning

elements
body

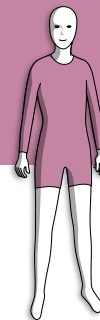

DRÄKT utan ÄRMAR MED BEN

Orange & fyrkant = längd

Blå & ring = omkrets


Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. Alla mått skall tas när patienten är liggande, är avslappnad och har normalt andningsmönster. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning.

U	Omkrets bålen i höjd med naveln
C	Omkrets bröstkorgen i höjd med axillen
N	Runt halsen - från nedre delen av halsgropen (fossa jugularis sternalis) och runt halsens bas
NS	Halsbredd - Önskan om en vidare halsöppning, mått från halsens bas
ND	Halsdjup - Önskan om en halsöppning som går längre ner än halsgropen (fram)
BD	Djup vid nacke - Önskan om en djupare ringning vid nacken (bak)
S	Från halsens bas till acromion
SU	Från nedre delen av halsgropen till naveln- från samma punkt som vid mått "N"
AS	Omkrets i höjd med med ASIS
L/R 9	Omkrets lår vid grenen och horisontella gluteal-vecket, 90° ut
L/R 10	Omkrets mitt på låret
L/R 11	Omkrets mid-patella
L/R 12	Omkrets övre delen av underbenet vid tuberositas tibiae (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 13	Omkrets vadens vidaste del (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 14	Omkrets övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 15	Från grenen till mid-patella på insidan av benet
L/R 16	Insidan av benet från mid-patella till övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R Instep	Omkrets mitt över fotryggen (endast för långa ben)
WW	Midja till midja i höjd med naveln (grenmått). Vid användning av blöja, tages måttet vid sidan av blöjan
SCV	Från sjunde halskotan till axillen (placera en penna eller en linjal under båda armarna så längden inte blir för kort)

39310 DRÄKT

Vägledning till måttagning

elements
body

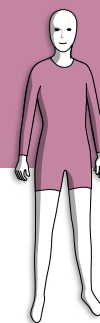

DRÄKT utan ÄRMAR MED BEN

Speciellt för korta ben och 3/4 ben:

CER/CEL Längden från grenen, på insidan av benet, till där dräkten slutar

Speciellt för kvinnor (ta mått med behå på, och med patienten sittande):

B Omkrets byst i linje med bröstvårtan

UB Omkrets under bysten

AUB Från axillen till under bysten (UB)

Speciellt för gastro (endast för Body):

GU Mått från naveln upp till hålet

GD Mått från naveln ner till hålet

GR Mått från naveln till hålet på höger sida

GL Mått från naveln till hålet på vänster sida