


39311, 39312 DRÄKT

Vägledning till måttagning

elements
body

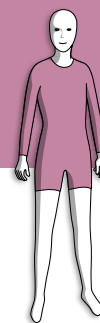

DRÄKT med ÄRMAR OCH BEN

Orange & fyrkant = längd

Blå & ring = omkrets

Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. Alla mått skall tas när patienten är liggande, är avslappnad och har normalt andningsmönster. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning.

U	Omkrets bålen i höjd med naveln
C	Omkrets bröstkorgen i höjd med axillen
N	Runt halsen - från nedre delen av halsgropen (fossa jugularis sternalis) och runt halsens bas
NS	Halsbredd - Önskan om en vidare halsöppning, mått från halsens bas
ND	Halsdjup - Önskan om en halsöppning som går längre ner än halsgropen (fram)
BD	Djup vid nacke - Önskan om en djupare ringning vid nacken (bak)
SU	Från nedre delen av halsgropen till naveln- från samma punkt som vid mått "N"
AS	Omkrets i höjd med med ASIS
L/R2	Omkrets arm i höjd med axillen, armen skal ligga längst sidan av kroppen
L/R3	Omkrets överarm mellan axillen och armbågen
L/R4	Omkrets armbåge, med armen i extension
L/R5	Omkrets underarm en tredjedel från armbågen till handleden (endast för lång ärm)
L/R6	Omkrets handled där man önskar att ärmen skall sluta (endast för lång ärm)
L/R7	Från axillen till armvecket
L/R8	Från armvecket till handleden, där man önskar att ärmen skall sluta (endast för lång ärm)


Speciellt för kort ärm:

AER/L *Från axillen till slutet på ärmen*

39311, 39312 DRÄKT

Vägledning till måttagning

elements
body

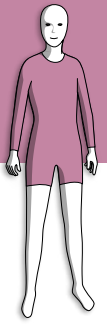

DRÄKT med ÄRMAR OCH BEN

L/R9	Omkrets lår vid horisontella gluteal-vecket
L/R 10	Omkrets mitt på låret
L/R 11	Omkrets mid-patella
L/R 12	Omkrets övre delen av underbenet vid tuberositas tibiae (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 13	Omkrets vadens vidaste del (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 14	Omkrets övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R 15	Från grenen till mid-patella på insidan av benet
L/R 16	Insidan av benet från mid-patella till övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och 3/4 ben)
L/R Instep	Omkrets mitt över fotryggen (endast för långa ben)
WW	Midja till midja i höjd med naveln (grenmått). Vid användning av blöja, tages måttet vid sidan av blöjan
SCV	Från sjunde halskotan till axillen (placera en penna eller en linjal under båda armarna så längden inte blir för kort)
	Speciellt för korta och 3/4 ben:
CER/CE	<i>Längden från grenen, på insidan av benet, till där dräkten slutar</i>

Speciellt för kvinnor (ta mått med behå på, och med patienten sittande):

B	Omkrets byst i linje med bröstvårtan
UB	Omkrets under bysten
AUB	Från axillen till under bysten (UB)

Speciellt för gastro (endast för Body):

GU	Mått från naveln upp till hålet
GD	Mått från naveln ner till hålet
GR	Mått från naveln till hålet på höger sida
GL	Mått från naveln till hålet på vänster sida