

39320 BYXA

Vägledning till måttagning

elements
body



Orange & fyrkant = längd

Blå & ring = omkrets

Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. Alla mått skall tas när patienten är liggande, är avslappnad och har normalt andningsmönster. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning.

C	Omkrets bröstkorgen i linje med axillen
U	Omkrets bålen i höjd med naveln
E	Omkrets vid slutet av plagget
AS	Omkrets i höjd med med ASIS
UE	Naveln till slutet av plagget, mått på sidan
L/R 9	Omkrets lår vid horisontella gluteal-vecket i en vinkel på 90 grader
L/R 10	Omkrets mitt på låret (Halvvägs mellan L/R 9 och L/R 11)
L/R 11	Omkrets mid-patella
L/R 12	Omkrets övre delen av underbenet vid tuberositas tibiae (endast för långa ben och $\frac{3}{4}$ ben)
L/R 13	Omkrets vadens vidaste del (endast för långa ben och $\frac{3}{4}$ ben)
L/R 14	Omkrets övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och $\frac{3}{4}$ ben)
L/R 15	Från grenen till mid-patella på insidan av benet
L/R 16	Insidan av benet från mid-patella till övre kanten av mediala malleolen (endast för långa ben och $\frac{3}{4}$ ben)
L/R Instep	Omkrets mitt över fotryggen (endast för långa ben)
WW	Midja till midja i nivå med naveln (grenmått). Vid användning av blöja, tages måttet vid sidan av blöjan

Speciellt för korta och 3/4 ben:

CER/CEL = Längden tas på insidan av benet från skrevet till där benet ska sluta.