


39300, 39301 VÄST 39305, 39306 BODY Vägledning till måttagning

elements
body

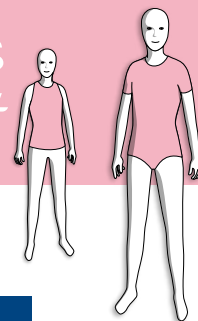

VÄST och BODY med ÄRMAR

Orange & fyrkant = längd

Blå & ring = omkrets


Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. Alla mått skall tas när patienten är liggande, är avslappnad och har normalt andningsmönster. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning.

U	Omkrets bålen i höjd med naveln
C	Omkrets bröstkorgen i linje med axillen
E	Omkrets vid slutet av plagget
N	Runt halsen - från nedre delen av halsgropen (fossa jugularis sternalis) och runt halsens bas
NS	Halsbredd - Önskan om en vidare halsöppning, mått från halsens bas
ND	Halsdjup - Önskan om en halsöppning som går längre ner än halsgropen (fram)
BD	Djup vid nacke - Önskan om en djupare ringning vid nacken (bak)
SU	Från nedre delen av halsgropen till naveln- från samma punkt som vid mått "N"
AS	Omkrets i höjd med med ASIS
UE	Naveln till slutet av plagget, mått på sidan
L/R2	Omkrets arm i höjd med axillen, armen skall ligga längst sidan av kroppen
L/R3	Omkrets överarm, mellan axillen och armbågen
L/R4	Omkrets armbåge, med armen i extension
L/R5	Omkrets underarm, en tredjedel från armbåge till handled
L/R6	Omkrets handled, där man önskar att ärmen skall sluta
L/R7	Från axillen till armvecket
L/R8	Från armvecket till handleden, där man önskar att ärmen skall sluta
WW	Midja till midja i höjd med naveln (grenmått). Vid användning av blöja, tages måttet vid sidan av blöjan
SCV	Från sjunde halskotan till axillen (placera en penna eller en linjal under båda armarna så längden inte blir för kort)

CampScandinavia, JULI_2021©

39300, 39301 VÄST 39305, 39306 BODY Vägledning till måttagning

elements
body

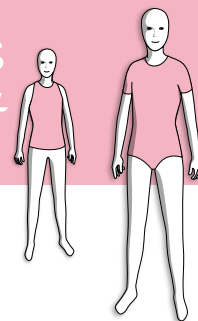

VÄST och BODY med ÄRMAR

Speciellt för kort ärm:

AER/L *Från axillen till slutet på armen (endast för korta ärmar)*

Speciellt för kvinnor (ta mått med behå på, och med patienten sittande):

B Omkrets byst i linje med bröstvårtan

UB Omkrets under bysten

AUB Från axillen till under bysten (UB)

Speciellt för gastro (endast för Body):

GU Mått från naveln upp till hålet

GD Mått från naveln ner till hålet

GR Mått från naveln till hålet på höger sida

GL Mått från naveln till hålet på vänster sida