



Support for better life!

OPED Diabetesfotortoser

Optimerad vård för
diabetesfoten




Tryckavlastning – för patienten, läkaren och vårdpersonalen

Vid diabetesfot är en jämn tryckfördelning och avlastning av såret avgörande. Det är just detta som Foot Concept Diabetic erbjuder: en exakt formad och stabil bädd för foten. En vakuumpudde, innesluten i ett lätt plasthölje, kan anpassas till alla fotformer och typer av deformiteter.

Foot Concept Diabetic-produkterna är därför idealiska avlastning vid olika typer av diabetesfot.

De är enkla att använda, utformade för att möta patientens behov och för att minska arbetsbelastningen för vårdpersonalen.

Fördelar

- Tryckfördelning tack vare VACO12-teknologi 
- Förbättrad sårhäkning tack vare utmärkt tryckavlastning
- Enkel sårkontroll förenklar behandlingen
- Rullsula för god tryckfördelning samt ett bättre gångmönster
- Hög patientföljsamhet tack vare enkel användning och modern design

Indikationer	VACOfast Diabetic	VACOfedes Diabetic	VACOfaso Free
Fotproblem på grund av diabetes	✓	✓	✓
Sårbildningar på foten	✓	✓	✓
Postoperativ vård efter tåamputationer	✓	✓	✓
Postoperativ vård efter framfotsamputationer	✓	✓	✓
Diabetisk neuroosteoartropati (DNOAP)	✓	✓	✓
Charcotfot	✓		




Produktegenskaper


- 1 Vakuumkudde **VACO12** möjliggör individuell anpassning, även vid svullnad.
- 2 Hög ram för optimal stabilitet.
- 3 Valfri låsning för att förhindra oönskat borttagande av ortosen.
- 4 Utbytbara och tvättbara liners för enkel sårkontroll och bättre hygien.
- 5 Rullsula för ett bättre gångmönster.
- 6 Förlängningsbar tåplattform för optimalt skydd av framfoten.
- 7 Brett skal för att rymma vakuumkudden.
- 8 Tåskydd skyddar foten mot smuts och stenar.



The VACO12 Principle

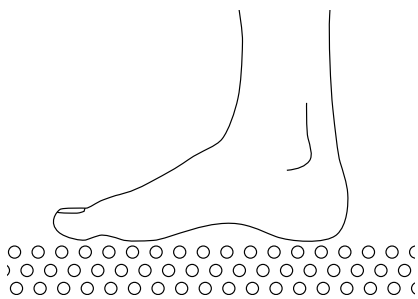

När vakuumkudden är fylld med luft kan den anpassas till fotens storlek och form.

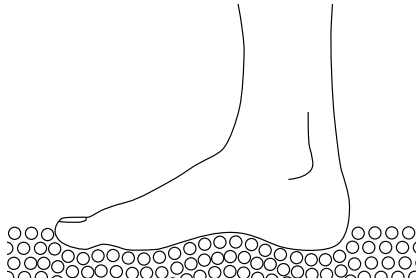

När ortosen appliceras på patientens fot, avlägsnas luften via en ventil, och kulorna formar sig efter benets konturer. Detta ger också total avlastning av trycket.



Anpassningsprocessen kan upprepas så ofta som behövs, vilket möjliggör justering vid förändringar i benets form, till exempel svullnad.

Riktlinjer från International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Rekommendationer för läkning av ett neuropatiskt sår på framfoten eller mellanfoten hos en person med diabetes:

Förstahandsval för avlastning

„... använd en icke-avtagbar knähög avlastningsanordning som förstahandsval för att främja sårhäkning (Stark rekommendation)“

„... välj antingen ett totalgips eller en icke-avtagbar knähög walker (Villkorlig; Måttlig evidens)“

Andrahandsval för avlastning


„... om en icke-avtagbar knähög avlastningsanordning är kontraindicerad eller inte tolereras, överväg att använda antingen en avtagbar knähög eller fotledshög avlastningsanordning som andrahandsval för behandling... (Villkorlig; Måttlig evidens)“

„... använd inte... konventionella skor eller standardterapeutiska skor över en avlastningsanordning... (Stark rekommendation, Låg evidens)“

Tredjehandsval för avlastning

„... om avlastningsanordningar inte är tillgängliga, överväg att använda skum av filt i kombination med korrekt anpassade skor som tredjehandsval för avlastning (Villkorlig; Mycket låg evidens)“

„... om en knähög eller fotledshög avlastningsanordning används, överväg även att använda en skolyft på det motsatta benet för att förbättra personens komfort och balans vid gång i anordningen (Villkorlig; Mycket låg evidens)“

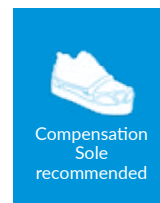


Recommended as 1st Choice Offloading



Knee-high non-removable Devices such as

- Total Contact Cast
- Non-removable Walkers

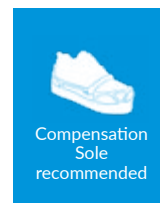


Recommended as 2nd Choice Offloading



Removable knee-high Walker



Ankle high offloading Device

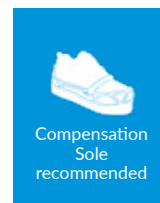

Recommended as 3rd Choice Offloading



Felt/Padding/ Offloading Shoe

Överlägsna resultat vid behandling av diabetiska fotsår med VACOCast Diabetic!

An Evaluation Of The VACOCast Diabetic Boot Within The Community!

G. Bowen (Clinical Lead Podiatry Solent NHS Trust), P. Spruce (Clinical Director TVRE Consulting, UK, May 2018





Patienter och metod



- 20 patienter med diabetes (17 med fotsår, 3 med charcotfot)
- Behandling med VACOCast Diabetic i upp till 8 veckor

Resultat

16 av 17 fotsår förbättrades eller läkte inom 8 veckor!

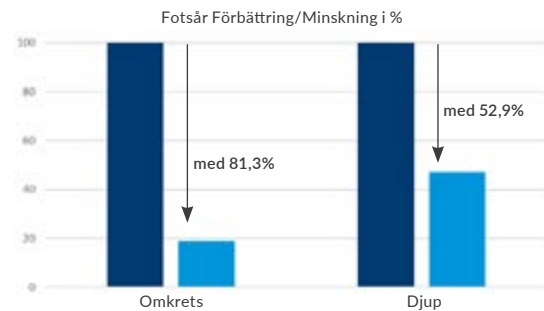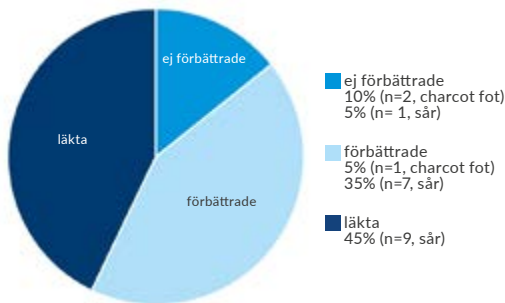

Kostnads- och tidseffektiv behandling med VACOCast Diabetic jämfört med TCC-EZ!

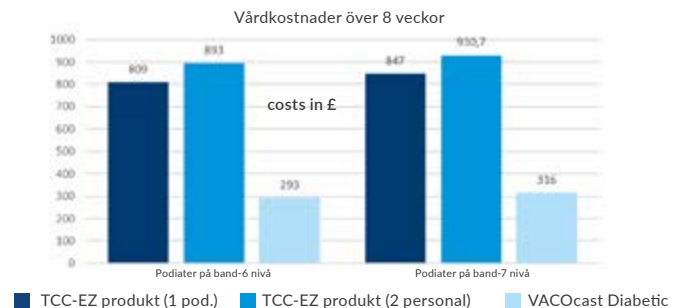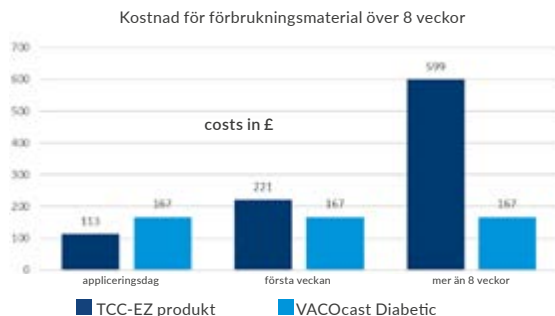

Färdigställd terapisko


VACO[®] by OPED
paso
FREE

- 1** Speciellt innermaterial
Mjukt och vätskeavvisande.
- 2** Kan bäras på båda fötterna
Tack vare enkel öppning av Velcro[®]-remmarna, vilket också sparar utrymme.
- 3** Fri tåyta
Ger gott om plats för förband.
- 4** Justerbar VACO12 Innersula **VACO12**
Fyllt med små kulor och kan optimalt anpassas till fotens form. Fotens kontaktyta maximeras, vilket möjliggör optimal tryckfördelning. Tack vare delvis avtagbara skummaterialdelar kan ytterligare tryckavlastning ges på problemområden på foten.
- 5** Extremt styv sula
Väldigt stabil och styv sula som minimerar skjuvkrafter och ger fast stöd.
- 6** Rullsula
För ett optimalt gångmönster och gör att patienten kan stå säkert.
- 7** Innovativt system för hälstabilitet
Ger optimalt stöd och så mycket utrymme som möjligt för foten i hälmrådet.




The VACO12 Insole

VACOpaso Free anpassar sig enkelt till foten. Detta underlättar optimal tryckavlastning. Med sin VACO12-innersula erbjuder den hög komfort på de mest känsliga delarna av foten. VACO12-kulor och individuellt avtagbara sulkuddar garanterar optimal komfort.

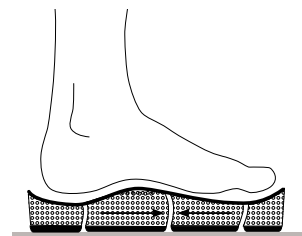

Kulorna anpassar sig efter fotens anatomi. Stabil och jämn tryckfördelning för att förhindra trycktoppar.

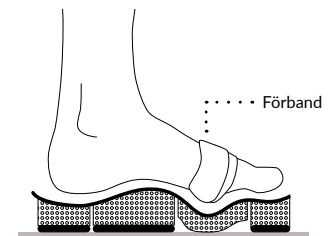

Genom att ta bort en del av skummaterialiet kan ytterligare tryckavlastning uppnås i vissa områden.

- Korrigerar höjdskillnaden mellan det friska och skadade benet
- Säkerställer ett harmoniskt gångmönster
- Lätt att fästa på vilken platt sko som helst
- Kan användas för både vänster och höger fot



Skanna eller klicka för mer information om mått och storlekar.

Storlekar

Art. Nr.	Modell	Storlek	Skostorlek
476350011	VACOCast	Small	35-40
476350012	VACOCast	Medium	40-45
476350013	VACOCast	Large	45-50
476340011	VACOPedes	Small	35-40
476340012	VACOPedes	Medium	40-45
476340013	VACOPedes	Large	45-50
476380010	VACOpaso Free	X-Small	37-38
476380011	VACOpaso Free	Small	39-40
476380012	VACOpaso Free	Medium	41-42
476380013	VACOpaso Free	Large	43-44
476380014	VACOpaso Free	X-Large	45-46
476380015	VACOpaso Free	XX-Large	47-48

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no