

BRUKSANVISNING

SBi COVER

SBI COVER

SBI överdraget skyddar och håller produkten ren.

Överdraget är designat för att användas tillsammans med produkterna SBI Motus, Motus Smart, SBI Frame och SBI Wheel.

Materialet är semi-elastiskt med blixtlås på baksidan.

Gummisulan ger ökad stabilitet vid gång.

Överdraget är tvättbart.



SBI Överdrag är väderbeständigt och gjort för att skydda mot svåra väderförhållande; det är dock inte avsett för att användas i vatten/bad. Var extra uppmärksam på hala golvytor och våta underlag. Kör inte bil med SBI Walker på, med eller utan överdrag.

INSTRUKTION

STEP 1

Öppna blixtlåset.

STEP 2

Tag på walkern först och sen överdraget.

STEP 3

När överdraget är på plats, drag upp dragkedjan hela vägen upp.



Step 1



Step 2



Step 3

MATERIAL

100% Lycra

RENGÖRING

Tvätta överdraget förhand, vänt ut och in. Låt lufttorka.

GARANTI

Överdraget har garanti för tillverkningsfel. Om du upptäcker något problem med produkten, kontakta utprovaren omedelbart.

NOTE

SBI Överdraget får inte användas vid bad, dusch eller simning. En korrekt applicering är väsentlig för att uppnå rätt funktion. Följ de riktlinjer och instruktioner som du fått av utprovaren.



Optima Molliter S.r.l.
Via Breda, 19/21 • 62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 • F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com