



Bruksanvisning

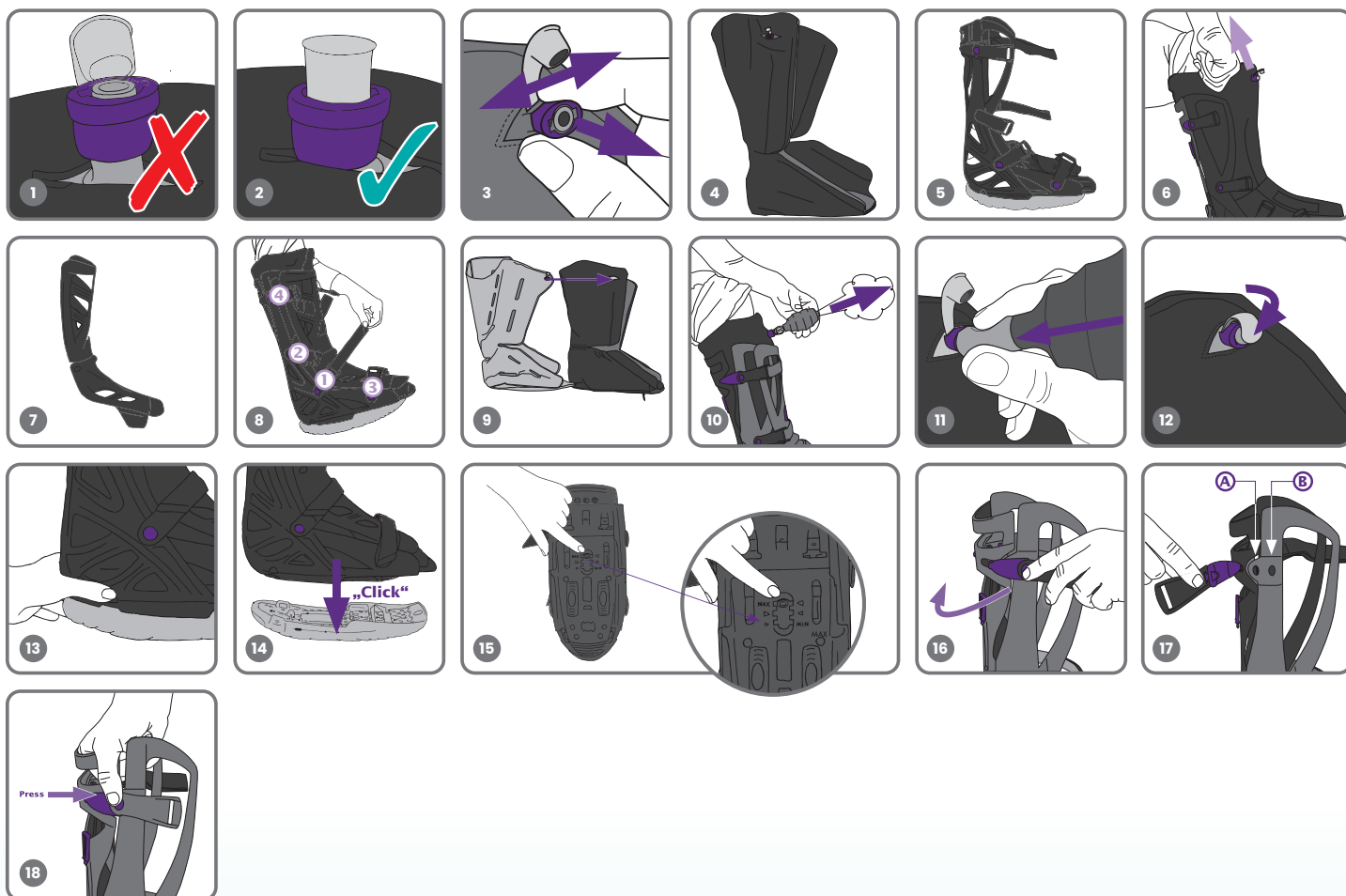

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder VACOCast Diabetic.

Syfte: Underbens- och fotortos utformad för att avlasta tryck och immobilisera leder i angiven position. Läsbara bruksanvisningar finns på vår hemsida.

Säkerhetsinformation

- ⚠ Produkten är endast avsedd för användning på en patient.
- ⚠ VACOCast Diabetic är inte utformad för dynamiska aktiviteter såsom hoppande och rask gång. Om du ramlar när du använder VACOCast Diabetic, kontrollera omedelbart om ortosen är skadad. Om VACOCast Diabetic är skadad kan det påverka din säkerhet.
- ⚠ Använd aldrig produkten över öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Om kraftig smärta, domningar eller känselförändringar inträffar, om ovanliga reaktioner eller en obehaglig känsla upplevs under användning av ortosen, kontakta omedelbart din läkare eller ortopedtekniker.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt är utformad för de angivna indikationerna och kan skadas av oavsiktlig eller felaktig användning, t.ex. i samband med idrott, fallolyckor, eller vid exponering för vätskor som är inkompatibla med plastmaterial.
- ⚠ Rådfråga din läkare när denna produkt används i kombination med en annan medicinteknisk produkt.
- ⚠ Endast reservdelar och/eller utbytesdelar som godkänts av OPED GmbH får användas.
- ⚠ Observera vägtrafiklagen som gäller i ditt land.
- ⚠ Ej tillverkad med naturgummilatex. 
- ⚠ Kontrollera att sulan sitter säkert – annars finns det risk för att halka! Sula: När tåsektionen är helt förlängd kan gångmönstret förändras eller begränsas.
- ⚠ Pärlorna i vakuumdynan kan flyttas runt. Vi rekommenderar därför att ventilen öppnas varannan till var tredje dag, för att utjämna eventuella anhopningar av små pärlor, och därefter återställa vakuomet.
- ⚠ Förvaring: Ventilklaffen måste alltid vara stängd! Ventilringen måste tryckas nedåt och ventilklaffen måste stängas (Figur 1 + 2)
- ⚠ Denna produkt är avsedd att användas i högst 6 månader.
- ⚠ Observera: När du bär ortosen, se till att skon på motsatt sida är tillräckligt hög eller att sulan höjs för att kompensera för nivåskillnaden.

Så här använder du produkten

Montering av VACOCast Diabetic

Dra ventileringen uppåt (detaljer finns i "Ventilfunktioner") för att låta luft flöda in (fig. 3). Om de små pärlorna i fodret (fig. 4) har ansamlats, stryk dem släta. Placera din fot i tygfodret (fig. 4) och passa in den med tygfodret hela vägen i det nedre höljet (fig. 5). Stäng sedan tygfodret. Dra fodret en aning uppåt (fig. 6). Passa in det övre höljet (fig. 7) (toppen: utsidan mot det undre skalet; botten: filkar in i det undre skalet) och stäng banden för hand och i den utsträckning smärtan tillåter (se fig. 8). Vid montering av det övre höljet, se till att ventilen inte är klämd. Det övre höljet ska inte placeras mot eller över ventilen.

Justera och fixera vakuumdynan

Återjusterbar vakuumdyna: Tygskyddet innehåller en dyna fylld med pärlor. (fig. 9) För att förhindra att pärlorna glider in i dynan, sug luften ut via ventilen med hjälp av sugpumpen, vilket skapar ett vakuum (fig. 10). Dynan anpassas därför perfekt till fotens anatomi och svullnad. Tryckkänsliga områden, och svullnader kan lindras genom målinriktad omfördelning av pärlorna.

Ventilfunktioner

Öppna ventilen/mjuka upp vakuumdynan:

Dra ventileringen uppåt och för den åt sidan för att låta luft flöda in (figur 3). Skjut sedan tillbaka ventileringen till sin ursprungliga position.

Stänga av vakuum/härda vakuumdynan:

Tryck ventileringen nedåt. Anslut sugpumpen och krama den (ca 7-8 gånger) tills den inte längre fylls med luft. Krama pumpen för att avlägsna luft från dynan och skapa ett vakuum. Detta fixerar den anpassade passformen på plats (fig. 11). Stäng ventillocket för att avsluta (fig. 12).

Stänga ventillocket

Tryck ned ventileringen och stäng ventillocket. Detta ställer in vakuomet (fig. 12).

Byte av dynfoder

Det medföljande reservfodret innehåller ingen dyna! Vid byte av foder måste dynan tas bort från det använda fodret och sätts in i det nya fodret! Öppna det bakre blixtlåset hela vägen och ta bort dynan från det använda fodret. Öppna ventilen och skaka ut kudden så att de små pärlorna kan omfördela sig själva (se ventilfunktioner). Skapa vakuomet (se ventilfunktioner), placera vakuumkudden i det nya fodret och för ventilen genom knapphållet (Figur 9). Ett extra tygfoder ingår inte i förpackningen i alla länder. Om den medföljande förpackningen inte innehåller ett extra tygfoder, måste det beställas separat.

Inpassning och byte av sula

Ta bort sulan

Tryck på båda upplåsningsknapparna samtidigt (figur 13).

Passa in sulan

Placera VACOCast Diabetic rakt och centrerat på sulan innan du trycker den mot sulan (du hör två klickljud) (fig. 14). Kontrollera att sulan sitter ordentligt.

Justering av sulans längd

Ta bort sulan och tryck på upplåsningsknappen (fig. 15). Flytta tåstycket till önskad position.

Justera omkretsen runt vaden

Skjut spännet på båda sidorna ut ur det nedre höljet (figur 16). Skjut spännet till önskat läge. Position A = stor vadamkrets, position B = liten vadamkrets (figur 17). Tryck in spännet i det önskade hålet (figur 18).

Patientinformation

Tryckpunkter/problemösning

Avlägsna ortosen från foten. Dra i ventileringen för att låta luft flöda in i dynan. Fördela dynans fyllning jämnt vid tryckpunkten. Sätt på ortosen igen. Använd ett finger för att kontrollera att det finns tillräckligt med små pärlor i kudden mellan tryckpunkten och det yttre undre skalet.

Dusch/tvätt

Du kan duscha med produkten om din läkare har gett dig tillåtelse att göra det. Ortosen särskilt höljet, måste skyddas mot vatten (t.ex. genom att använda ett duschskydd).

Sömn

Innan du somnar ska du placera en handduk under enheten så att lakanet inte tar skada.

Produktegenskaper

Storlekar

Produkten kan bäras på vänster eller höger sida.

Rekommendation: För storleksgränshiten mellan Small/Medium och Medium/Large, välj om möjligt den mindre versionen av VACOCast Diabetic.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	39 – 43	43 – 49
UK	2 ½ – 5 ½	5 ½ – 8 ½	8 ½ – 13 ½
US (M)	3 ½ – 6 ½	6 ½ – 9 ½	9 ½ – 14 ½
US (F)	4 ½ – 7 ½	7 ½ – 10 ½	10 ½ – 15 ½

Indikationer

- Sårbildningar på foten
- Diabetessår på foten
- Postoperativ vård efter tå- och framfotsamputationer
- Diabetisk neuro-osteopropati (DNOAP) eller Charcot

Kontraindikationer

Inga kända

Information om skötsel/rengöring/desinfektion/sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick.

- Nedre hölje: Diskmaskin vid 60 °C.
- Rem: Tvättmaskin vid 40 °C.
- Velour-skydd: Tvättmaskin vid 60 °C, tvätta med liknande färger. Ta bort dynan före tvätt. Stäng blixtlås och kardborrstäporna igen.
- Torkning: Lufttorka, torka inte i en torktumlare.
- Vakuumdyna: Ytdesinfektion
- Sterilisering: Denna medicintekniska produkt är inte lämplig för sterilisering.



Tillbehör

För att stödja behandlingen, kan följande tillbehör, om de inte ingår i leveransen, beställas från OPED GmbH:

- Bandlås (VERS-16-4-41): Bandlåset kan användas för att låsa ortosen och säkerställa att den kan inte tas bort. Enheten läses och läses upp med en speciell nyckel och kan därför låsas och läsas upp upprepade gånger.
- Låsnyckel (VERS-11-3): Låsnyckeln kan användas för att förhindra oavsiktlig borttagning av ortosen.

Tekniska data/parametrar

Material i enheten:

Hårt nedre hölje (PP), foder (bomull/PA velour/PU-skum), dynhylsa (PVC), fyllningsmaterial (EPS-sfärer), rem (PP-tyg), sula (EVA), övre hölje (PP/PU). Alla delar och komponenter är latexfria.

Transportförhållanden/förvaringsförhållanden/bortskaffande

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas mot direkt solljus.

Tyskland: Den medicinska enheten är en uthyrningsprodukt och måste återlämnas till OPED.

Schweiz: Den medicinska enheten kan återlämnas till OPED kostnadsfritt.

Övriga länder: Kassera den medicintekniska produkten som brännbart avfall eller hushållssopor.



Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande bestämmelser. OPED GmbH:s affärsvillkor och bestämmelser gäller också, där så är tillåtet.

Dataskydd

Tyskland: Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Schweiz: Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <https://oped.de/datenschutz>.

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, kontakta tillverkaren direkt. Endast allvarliga händelser som kan leda till en betydande försämrad hälsa eller dödsfall ska rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter i medlemsstaten. Allvarliga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team