


Bruksanvisning

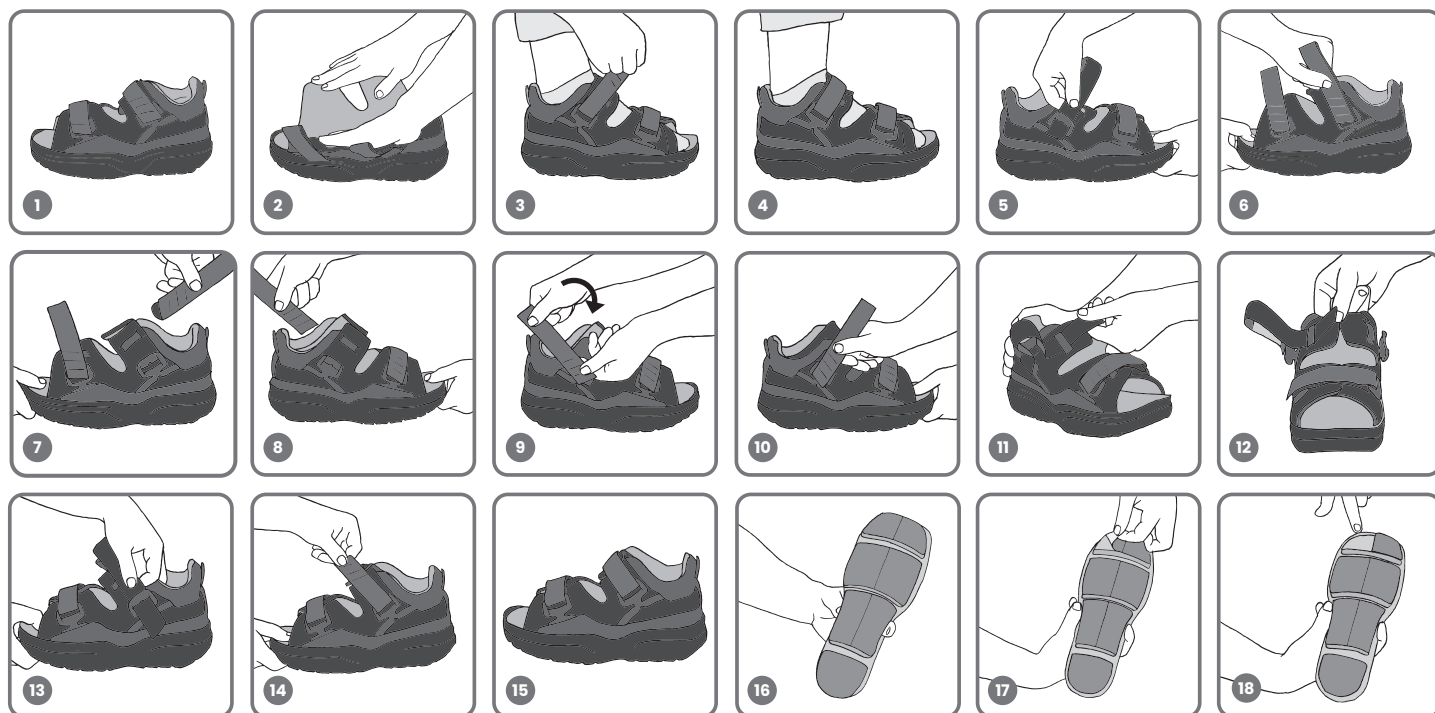

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder VACOpaso Free.

Syfte: Färdiga behandlingsskor för att minska trycket på fötter med diabetessår. Du hittar läsbara instruktioner för användning på vår hemsida.

Säkerhetsråd

- ⚠ Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska endast användas av en patient.
- ⚠ Applicera aldrig produkten på öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Om kraftig smärta, domningar eller känsselförändringar inträffar, om ovanliga reaktioner eller obehagskänsla upplevs medan du använder enheten, kontakta omedelbart din läkare eller ortopedtekniker.
- ⚠ Vid hudrodnad eller blåsor, eller om du upplever tryck eller friktion, kontakta omedelbart din läkare.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt är utformad för de angivna indikationerna och kan skadas av oavsiktlig eller felaktig användning, t.ex. i samband med idrott, fallolyckor, eller vid exponering för vätskor som är inkompatibla med plastrmaterial.
- ⚠ Rådfråga din behandlande läkare innan du använder enheten tillsammans med en annan medicinteknisk enhet.
- ⚠ Endast reservdelar som godkänts av OPED GmbH får användas.
- ⚠ Följ vägtransportlagstiftningen i ditt land.
- ⚠ Ej tillverkad med naturgummilätex. 
- ⚠ Kontrollera funktionen hos VACOpaso Free under regelbundna sårkontroller. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller din OPED-återförsäljare.

Så här använder du enheten (instruktionsvideo finns på app.oped.de)

- Öppna bandet helt. Öppna skon tillräckligt mycket för att kunna föra in foten (fig. 2)
- Sätt i foten och fäst bandet (fig. 3).

Justering för höger fot

VACOpaso Free kan bäras på endera foten. Skons standardinställning är avsedd för användning på vänster fot. Följande instruktioner används för att konvertera enheten till höger fot.

- Lossa bandet (fig. 5)
- Vrid bandet 90° (fig. 6)
- Ta bort bandet (fig. 7)
- Fäst bandet på motsatt sida enligt bilden (fig. 8)
- Sätt in remklämman i låset (fig. 9)
- Tryck ned remtätningen och vrid 90° tills den snäpper. (fig. 10)
- Dra bandet genom den första slingan (fig. 11)
- VARNING: Använd inte öglan på andra sidan (fig. 12)
- Trä bandet genom motsatt hyska (fig. 13)
- Stäng kardborrfästet (fig. 14)

Anpassa innersulan

- Patienten får endast justera enheten i samråd med sin behandlande läkare.
- Skummaterial under innersulan är uppdelat i sju sektioner som kan tas bort individuellt – detta gör det möjligt att minska trycket på de relevanta delarna av foten (Fig. 16).
- Avlägsna och kassera motsvarande sektioner av skummaterial från sulan (Fig. 17).
- Sätt tillbaka innersulan i VACOpaso Free.

Information om skötsel/rengöring/desinfektion sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick. Sko och innersula: Rengör enheten genom att torka av den med plastvänliga rengöringsmedel. Torkning: Lufttorkning. Torka inte i torktumlare. Desinfektion: Torka av enheten med ett plastkompatibelt desinfektionsmedel. Sterilisering: Denna medicinska produkt är inte lämplig för sterilisering.

Transportförhållanden/förvaringsförhållanden/bortskaffande

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas från direkt solljus. Kassera den medicintekniska produkten i behållaren för brännbara rester eller hushållssopor. 

Produktegenskaper

Kan användas på höger eller vänster fot. Kan bäras som en vardagssko både inomhus och utomhus. Tabell över storlekar

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
EUR	37 – 38	39 – 40	41 – 42	43 – 44	45 – 46	47 – 48
UK	4 – 5	5,5 – 6,5	7 – 8	8,5 – 9,5	10 – 11,5	12 – 13,5
US men		6,5 – 7,5	8 – 9	9,5 – 10,5	11 – 12	12,5 – 13,5
US women	6 – 7	7,5 – 8,5	9 – 10	10,5 – 11,5		
cm	24,5	26	27	28	29,5	31

Indikationer

- Sår bildningar på foten
- Diabetessår på foten
- Postoperativ vård efter tå- och framfotsamputationer

Kontraindikationer

Inga kända

Tekniska data/parametrar

Materialsammansättning: Yttersula (PU), innersulans stöd (PA), remspänning (TPE), foder (EVA-skum), överdrag (elastan), kardborre (PA); dynöverdrag (PU-skikt), fyllningsmaterial (PP-sfärer), överskikt (PE-skum)

Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande regelverk. OPED GmbH:s affärsvillkor och -bestämmelser gäller också, där så är tillåtet.

Dataskydd

Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <http://oped.de/support/your-data/>. Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, kontakta tillverkaren direkt. Endast allvarliga händelser som kan leda till en betydande försämrad hälsa eller dödsfall ska rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter i medlemsstaten. Allvarliga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team