


Bruksanvisning

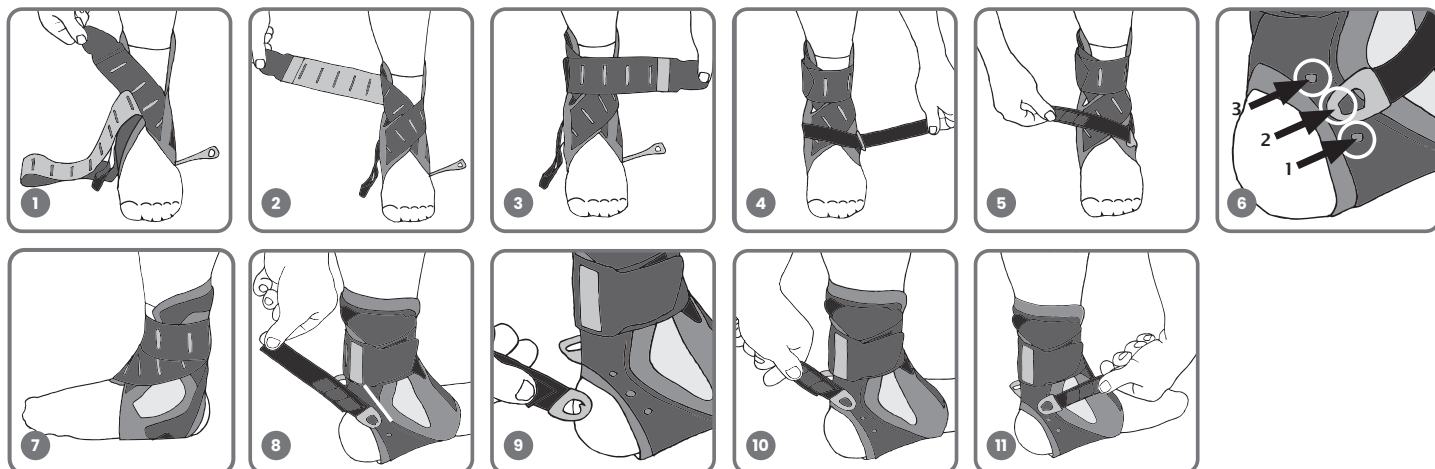

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder VACOTALUS. Du hittar läsbara instruktioner för användning på vår hemsida.

Syfte: Ankelortos för stabilisering på en nivå, justerbar. Ledrörelser på supinations- och pronationsnivå bör förhindras, talusförskjutning bör begränsas.

SÄKERHETSINFORMATION

- ⚠ Produkt är endast avsedd för användning på en patient.
- ⚠ Ortosen ska endast monteras och dess användning förklaras av utbildad personal.
- ⚠ Applicera aldrig produkten på öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Patienten får endast justera produkten i samråd med sin behandlande läkare.
- ⚠ Om du upplever kraftig smärta, svullnad, domning, känselförändringar, ovanliga reaktioner eller obehagskänsla vid användning av enheten, kontakta omedelbart din läkare eller ortopedtekniker.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt är utformad för de angivna indikationerna och kan skadas av oavsiktlig eller felaktig användning, t.ex. i samband med idrott, fallolyckor, eller vid exponering för vätskor som är inkompatibla med plastmaterial.
- ⚠ Rådfråga din behandlande läkare innan du använder enheten tillsammans med en annan medicinteknisk produkt.
- ⚠ Observera vägtrafiklagarna som gäller i ditt land.
- ⚠ Undvik att fästa ortosen för hårt till en början.
- ⚠ Obs: VACOTALUS är ej tillverkad med naturgummilätex. ☒
- ⚠ Endast reservdelar som godkänts av OPED GmbH får användas.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack vare sin anatomiskt konturerade yttre ram, erbjuder VACOTALUS ankelortos en hög styvhet och effektiv stabilisering för att förhindra att fotleden vrids. Inverterade och reverserade rörelser är begränsade, plantar-/dorsala rörelser är möjliga, vilket innebär att fotens normala gångrörelse inte försämras.

En dyna fylld med pärlor gör att produkten anpassas särskilt väl till fotkonturerna. Ortosen bidrar även till att minska svullnad. Dessutom kan talusrörelsen begränsas av talusbandet (= stabilt band över fotens insteg/valv, se fig. 5) genom att använda de fyra möjliga inställningarna.

INDIKATIONER

- Akuta ligamentsskador i ankeln**
- Eftervård för frakturer i ankeln
 - Förebyggande av ligamentlesioner i ankeln
 - Kompensation för instabilitet i ankeln

KONTRAIKATION

Instabila frakturer

Så här använder du enheten (instruktionsvideo finns på app.oped.de)

ANVÄNDNINGSAVVISNINGAR:

VACOTALUS ska bäras över en strumpa. VACOTALUS ska bäras under en stängd, stadigt sko. Produkten är tillgänglig för antingen vänster eller höger fot, vilket anges på insidan av enheten. Börja med att öppna alla kardborband. Placera ortosen runt foten bakifrån och stäng banden så här:

Figur:

1. Stäng det korta övre diagonala bandet. (Fig. 1)
2. Fatta tag i det elastiska bandet på insidan av foten. Dra detta band diagonalt över fotryggen (fotvalvet), linda den bakåt runt benet och fäst den. (Fig. 2 + 3.)
3. Stäng talusbandet. (Fig. 4 + 5.)

ANVISNINGAR FÖR ATT SÄTTA FAST DET LÅNGA ELASTISKA BANDET:

- För mer stabilitet: börja med att sätta fast det ordentligt och linda den sedan löst bakom benet.
 - Vid svullnad/smärta: börja med att dra det löst över fotryggen (fotbågen),
 - Linda det därefter ordentligt bakom benet.
- För större vadmokretsar: linda bandet rakt över fotleden och runt benet.

Så här fungerar tur Talusbandet

För att begränsa talusförskjutningen, beroende på svullnadsgrad, kan talusbandet sättas fast på ortosens innersida i tre olika positioner, eller så kan den avlägsnas helt.

Position 1: maximal stabilitet

Position 2: hög stabilitet

Position 3: genomsnittlig stabilitet (fig. 6)

Talusbandet kan tas bort om endast en låg stabiliseringsnivå krävs. (Fig. 7.) Vid behov kan talusbandet förkortas till önskad längd med hjälp av en sax.

ÄNDRA TALUSBANDETS POSITION:

Öppna talusbandet helt.

Vrid talusbandet 90° uppåt. Bandet ska nu vara i linje med de tre hysköppningarna. Först nu kommer du att kunna haka fast talusbandet. (Fig. 8)

Lyft upp talusbandet och lossa den från ortosen. (Fig. 9)

Haka fast talusbandet i önskat läge och vrid den 90° framåt för att fästa talusbandet på ortosen. (Fig. 10.) Stäng talusbandet. (Fig. 11.)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkten finns för både vänster och höger fot.

	X-Small	Small	Standard
EUR	≤37	37 – 40	≥40
UK	≤4	4 – 6,5	≥6,5
US (M)	≤5	5 – 7,5	≥7,5
US (F)	≤6	6 – 8,5	≥8,5

Information om skötsel/rengöring/desinfektion sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick. Tvätta vid 30 °C med kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. ☒ 60° ☒ ☒ ☒ ☒ Torkning: Låt enheten lufttorka, torka den inte i en torktumlare. Desinfektion/sterilisering: Denna medicinska produkt är inte lämplig för desinfektion/sterilisering.

Tekniska data/parametrar

Material i enheten:
Hårt hölje: PA (polyamid), klämma: PA, remlänk: TPE (termoplastisk elastomer),
Invändigt material: PES (polyester)/EVA/PU, vaddering: PES/EPS/PA, talusrem: PA/PES,
Elastiska remmar: PU/PA/PES/silikon

Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande regelverk. OPED GmbH:s affärsvillkor och -bestämmelser gäller också, där så är tillåtet.

Patientinformation

Undvik att dra åt ortosen för hårt. Om du känner tryck ska du lossa banden.

Förvaringsförhållanden/kassering

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas mot direkt solljus.



Kassering: Kassera den medicintekniska produkten i behållaren för brännbara rester eller hushållssopor.



Dataskydd

Tyskland: Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <http://oped.de/support/ihre-daten/>.
Schweiz: Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Endast allvarliga händelser som kan leda till signifikant försämrad hälsa eller dödsfall ska rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter i medlemsstaten. Allvarliga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team