

Method TA™ AFO



METHOD TA™



Method TA™ AFO

Method TA™ AFO är en prefabricerad, anpassningsbar ortos som kan användas för att behandla ett brett spektrum av patologiska gångavvikelser vid stroke, CP, MMC, CMT och andra komplexa neuromotoriska störningar.

Indikationer:
CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT och andra neuromotoriska tillstånd som leder till gångavvikelser under ståfasen.

Kontraindikationer:
Patientvikt över 100 kg (220lbs)

*Högre viktgräns med inkluderad heavy duty stirrup

Egenskaper


- 1. Enkel att ta på med tibiaband med tumgrepp och statiskt friktionsskydd för enkel enhandsapplicering
- 2. Smutsavvisande, justerbara och ompositionerbara liners för komfort hela dagen
- 3. Avancerad prepreg-kolfiber för att utnyttja Triple Action®-ankelled fullt ut.
- 4. Rigid främre skena med laterala komponenter och supramalleolär förlängning för att motverka posturala avvikelser i fot och fotled.
- 5. Triple Action® ankelled med individuell justering av inriktning, motstånd i plantar och dorsalflexion, samt justerbar fjäderstyvhet.
- 6. Prepreg fotplatta som passar patientens sko och ger effektiv avrullning och energiretur för bättre gång.
- 7. Y-bygel för hög belastning ger förbättrad stabilitet och pålitlighet.



Applicerings- och justeringsprocedur

Method TA™ underlättar användningen av Becker's Systematic Tuning Procedure™ för Triple Action®-ankelled och erbjuder enkla instruktioner för snabb applicering och optimering.

Vår forskningsbaserade justeringsmetod standardiserar och förenklar processen, vilket ger en effektiv ortos som kan anpassas snabbare, utan tekniska hinder som kan störa den kliniska patientvården.

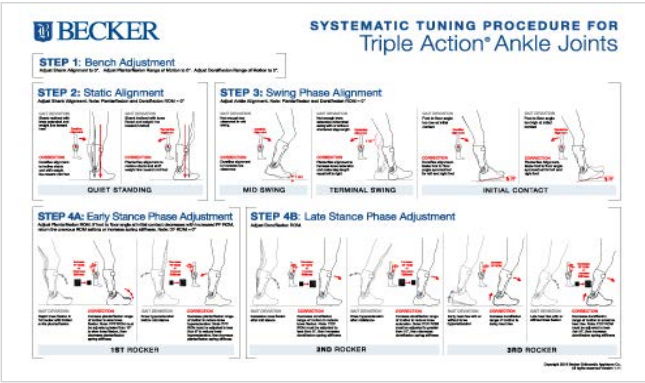

Klicka eller skanna QR-koden för att öppna Systematic Tuning Procedure™ PDF.



Beställning:

Art.nr.	Model	Vä/Hö	Storlek	Max Skostorlek	AFO Höjd	Fotplattans längd	Viktgräns
625851013	Method TA™	Vänster	Large	Herr: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625852013	Method TA™	Höger	Large	Herr: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625851011	Method TA™	Vänster	Small	Dam: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)
625852011	Method TA™	Höger	Small	Dam: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)

Använd endast enligt anvisning. Se IFU för fullständig säkerhetsinformation, indikationer, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no