

CAMP[®]



CoverKIT[™] 2.0

Ett nytt smart polstringsalternativ till Allard AFO
passar till ToeOFF[®] 2.0 och BlueROCKER[®] 2.0

Ni frågade - Vi lyssnade!

En del användare vill ha slätare yta, andra vill ha jämt tryck. Någon önskar sig ett mer osynligt utseende. **CoverKIT™ 2.0 är lösningen!**

CoverKIT™ 2.0 är en smart lösning som ger en låg profil och håller ortos och polster på plats utan band!



Drag hela strumpan på benet upp till knäet.



Tag fatt i den yttre delen vid den blå sömmen och dra upp det lagret.




Om det behövs, skall de två vertikala neoprenstavarna monteras i ortosen nu. Sätt ortosen i skon, sätt i foten och pressa sedan ortosen mot strumpan. Tag fatt i den blå sömmen och drag strumpan över ortosen. För extra säkerhet kan ortosens vanliga band användas.



- Smidigt och slätt utseende!
- Enkel att ta på och av - bara drag på den som en benvärmare.
- Ger en smidig yta som går hela vägen ner till slutet av skenan vilket hjälper byxor att glida utan att fastna i skenan.
- Insidan är ett luftigt non-friction material som tillsammans med utsidan ger en bra låsanordning av ortosen.
- Insidan som är som en SoftKIT™ skyddar huden och håller skenan på plats.
- CoverKIT™ levereras med två vertikala neoprenstavar som kan sättas på ortosens insida för att skapa en tryckfri kanal för att undvika tryck mot skenbenet.
- Ortosens vanliga band kan användas tillsammans med CoverKIT™.

Art.nr.	Storlek	Omkrets vad
28765 0010	X-Small	31 - 34 cm
28765 0011	Small	34 - 37 cm
28765 0012	Medium	37 - 41 cm
28765 0013	Large	41 - 46 cm
28765 0014	X-Large	46 - 51 cm

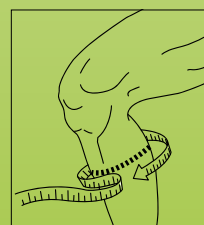

För mer information om Allard AFO besök allardafo.com

Patent Pending