


Bruksanvisning

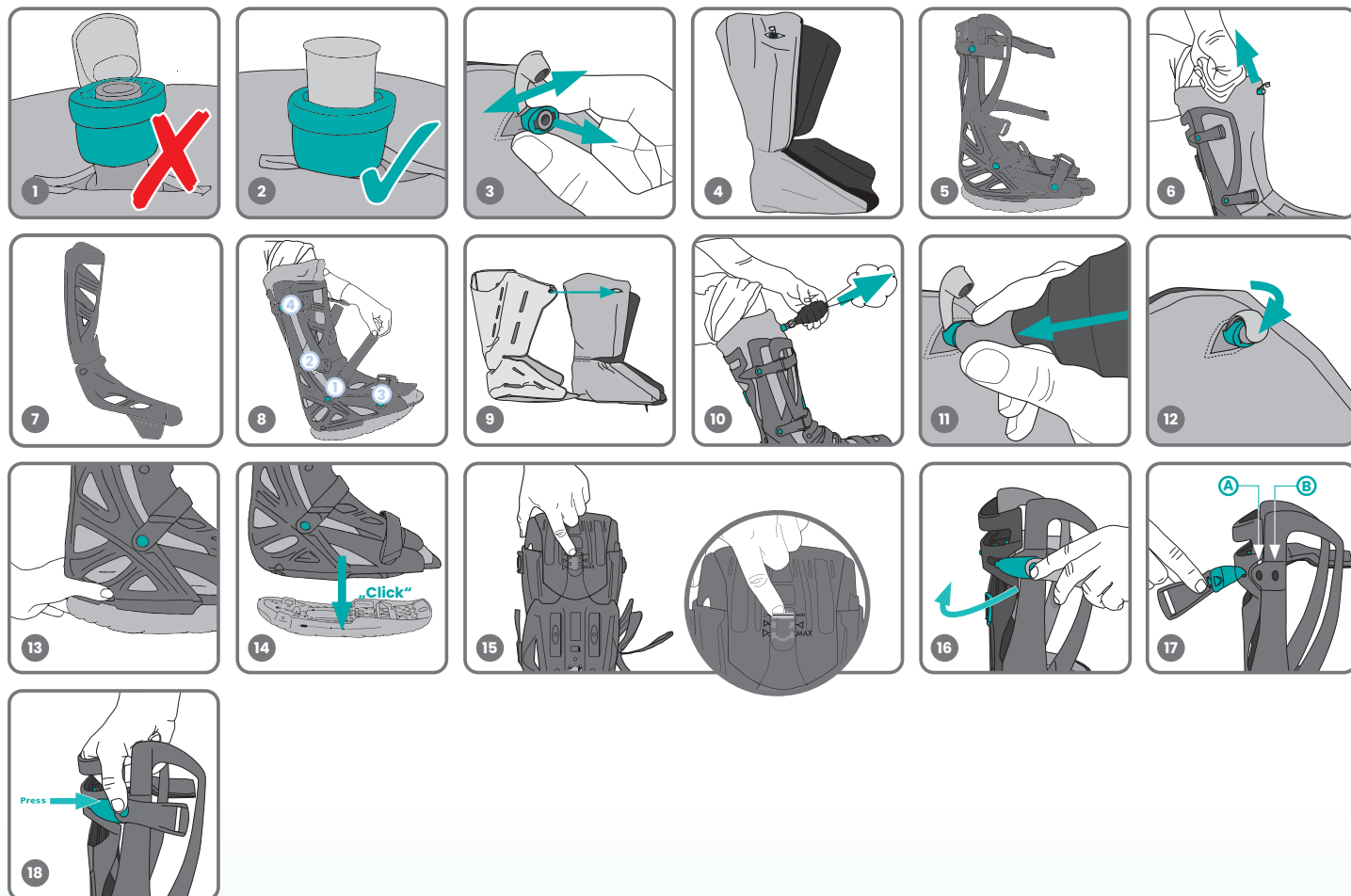

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder VACOCast.

Syfte: Underbens- och fotortos utformad för att avlasta tryck och immobilisera leder i angiven position. Läsbara bruksanvisningar finns på vår hemsida.

Säkerhetsinformation

- ⚠ Produkten är endast avsedd för användning på en patient.
- ⚠ VACOCast är inte utformad för dynamiska aktiviteter såsom hoppande och rask gång. Om du ramlar när du använder VACOCast, kontrollera omedelbart om ortosen är skadad. Om VACOCast är skadad kan det påverka din säkerhet.
- ⚠ Använd aldrig produkten över öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Om kraftig smärta, domningar eller känselförändringar inträffar, om ovanliga reaktioner eller en obehaglig känsla upplevs under användning av ortosen, kontakta omedelbart din läkare eller ortopedtekniker.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt är utformad för de angivna indikationerna och kan skadas av oavsiktlig eller felaktig användning, t.ex. i samband med idrott, fallolyckor, eller vid exponering för vätskor som är inkompatibla med plastmaterial.
- ⚠ Rådfråga din läkare när denna produkt används i kombination med en annan medicinteknisk produkt
- ⚠ Endast reservdelar och/eller utbytesdelar som godkänts av OPED GmbH får användas.
- ⚠ Observera vägtrafiklagen som gäller i ditt land.
- ⚠ Ej tillverkad med naturgummilätex. 
- ⚠ Kontrollera att sulan sitter säkert – annars finns det risk för att halka! Sula: När tåsektionen är helt förlängd kan gångmönstret förändras eller begränsas.
- ⚠ Pärllorna i vakuumdynan kan flyttas runt. Vi rekommenderar därför att ventilen öppnas varannan till var tredje dag, för att utjämna eventuella anhopningar av små kulor, och därefter återställa vakuomet.
- ⚠ Förvaring: Ventilklaffen måste alltid vara stängd! Ventilringen måste tryckas nedåt och ventilklaffen måste stängas (Figur 1 + 2)
- ⚠ Denna produkt är avsedd att användas i högst 6 månader.
- ⚠ Observera: När du bär ortosen, se till att skon på motsatt sida är tillräckligt hög eller att sulan höjs för att kompensera för nivåskillnaden.

Så här använder du produkten

Montering av VACOCast

Dra ventilringen uppåt (detaljer finns under "Ventilfunktioner") för att låta luft flöda in (figur 3). Om de små pärllorna i fodret (figur 4) har ansamlats, stryk dem släta. Placera din fot i tygfodret (figur 4) och passa in den med tygfodret hela vägen tillbaka i det nedre höljet (figur 5). Stäng sedan tygfodret. Dra fodret en aning uppåt (figur 6). Passa in det övre höljet (figur 7) (toppen: utsidan mot det undre skalet; botten: filkar in i det undre skalet) och stäng banden för hand och i den utsträckning smärtan tillåter (se bild 8). Dra åt banden efter att ha tagit några steg. Vid montering av det övre höljet, se till att ventilen inte är klämd. Det övre höljet ska inte placeras mot eller över ventilen. Om läkaren tillåter det, applicera lite tryck en kort stund så att dynan formas efter foten. Skapa sedan vakuomet.

Justera och fixera vakuumdynan

Återjusterbar vakuumdyna: Tygskyddet innehåller en dyna fylld med pärlor. (Bild 9) För att förhindra att pärlorna glider in i dynan, sugs luften ut via ventilen med hjälp av sugpumpen, vilket skapar ett vakuum (figur 10). Dynan anpassas därför perfekt till fotens anatomi och svullnad. Tryckkänsliga områden, känsliga områden och svullnad kan lindras genom målinriktad omfördelning av pärlorna.

Ventilfunktioner

Öppna ventilen/mjuka upp vakuumdynan:

Dra ventilringen uppåt för att låta luft flöda in (figur 3). Skjut sedan tillbaka ventilringen nedåt.

Stänga av vakuum/härda vakuumdynan:

Tryck ventilringen nedåt. Anslut sugpumpen och krama den tills den inte längre blåses upp. Krama pumpen för att avlägsna luft från dynan och skapa ett vakuum. Detta fixerar den anpassade passformen på plats (figur 11). Slutför genom att stänga ventillocket (figur 12).

Stänga ventillocket

Tryck ventilringen neråt och stäng ventillocket. Detta ställer in vakuomet (figur 12).

Byte av dynfoder

Det medföljande reservfodret innehåller inte en dyna! Vid byte av foder måste dynan tas bort från det använda fodret och sättas in i det nya fodret! Öppna det bakre blixtlåset hela vägen och ta bort dynan från det använda fodret. Placera dynan i det nya fodret och skjut ventilen genom knapphållet (figur 9). Ett extra tygfoder ingår inte i förpackningen i alla länder. Om den medföljande förpackningen inte innehåller ett extra tygfoder, måste det beställas separat.

Inpassning och byte av sula

Ta bort sulan

Tryck samtidigt på båda upplåsningsknapparna (figur 13).

Passa in sulan

Placera VACOCast-enheten rakt och centrerat på sulan innan du trycker den mot sulan (du hör två klick) (figur 14). Kontrollera att sulan sitter ordentligt.

Justering av sulans längd

Ta bort sulan och tryck på upplåsningsknappen. Flytta tåstycket till önskad position (figur 15).

Justera omkretsen runt vaden

Skjut spännet på båda sidorna ut ur det nedre höljet (figur 16). Skjut spännet till önskat läge. Position A = stor vadamkrets, position B = liten vadamkrets (figur 17). Tryck in spännet i önskat hål (figur 18).

Patientinformation

Tryckpunkter/problemlösning

Avlägsna ortosen från foten. Dra i ventilringen för att låta luft flöda in i dynan. Fördela dynans fyllning jämnt vid tryckpunkten. Sätt på ortosen igen.

Dusch/tvätt

Vi rekommenderar att du använder ett duschskydd när du duschar. Om ortosen eller dess överdrag blir våta, måste de torkas.

Sömn

Innan du somnar ska du placera en handduk under enheten så att lakanet inte tar skada.

Produktegenskaper

Storlekar

Produkten kan bäras på vänster eller höger sida. Rekommendation: För storleksgränssnitten mellan Small/Medium och Medium/Large, välj om möjligt den mindre versionen av VACOCast.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	39 – 43	43 – 49
UK	2 ½ – 5 ½	5 ½ – 8 ½	8 ½ – 13 ½
US (M)	3 ½ – 6 ½	6 ½ – 9 ½	9 ½ – 14 ½
US (F)	4 ½ – 7 ½	7 ½ – 10 ½	10 ½ – 15 ½

Indikationer

- Frakturer i fot och fotled
- Metatarsala frakturer
- Kalkaneusfrakturer
- Allvarliga ligamentskador
- Protes
- Steloperation av led

Kontraindikationer

Inga kända

Information om skötsel/rengöring/desinfektion sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick. Rengöringsanvisningar för patienter:

- Nedre hölje: Diskmaskin vid 60 °C
- Rem: Tvättmaskin vid 40 °C
- Frottéfoder: Tvättmaskin vid 60 °C

Ta ut vakuumdynan ur frottéfodralet innan du tvättar den. Stäng blixtlåset och kardborrfästena inför rengöring

- Desinfektion: Torka av enheten med ett plastkompatibelt desinfektionsmedel.
- Torkning: Låt enheten lufttorka, torka den inte i en torktumlare.
- Sterilisering: Denna medicinska produkt är inte lämplig för sterilisering.



Tekniska data/parametrar

Material i enheten:
Härda nedre höljen (PP), frottédukar (bomull/PU-skum), fyllningsmaterial (EPS-sfärer); rem(PP-tyg), sula (EVA), övre hölje (PP/PU). Alla delar och komponenter är latexfria.

Transportförhållanden/förvaringsförhållanden/bortskaffande

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas mot direkt solljus 
Tyskland: Denna medicinska enhet är en uthyrningsprodukt och måste återlämnas till OPED.

Schweiz: Den medicinska enheten kan återlämnas till OPED kostnadsfritt.

Övriga länder: Kassera den medicintekniska produkten som brännbart avfall eller hushållssopor 

Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande regelverk.

Dataskydd

Tyskland: Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: **<http://oped.ch/kontakt/your-data/>.**
Schweiz :Information om behandlingen av dina personuppgifter finns på: **<https://oped.de/datenschutz/>.**

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, kontakta tillverkaren direkt. Endast allvarliga händelser som kan leda till en betydande försämrad hälsa eller dödsfall ska rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter i medlemsstaten. Allvarliga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team