
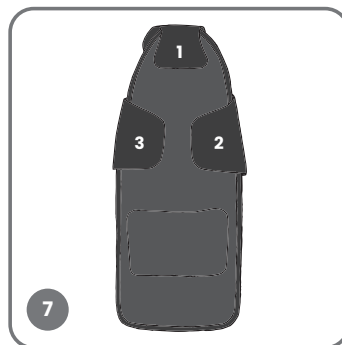
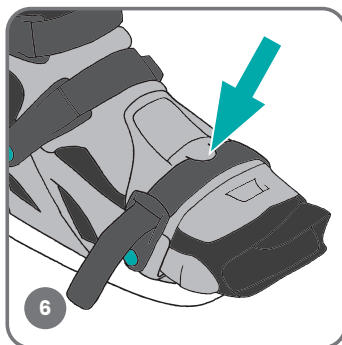
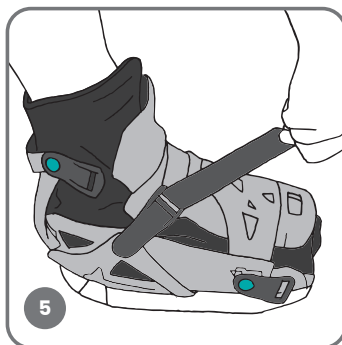
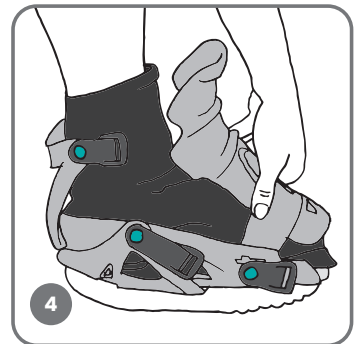
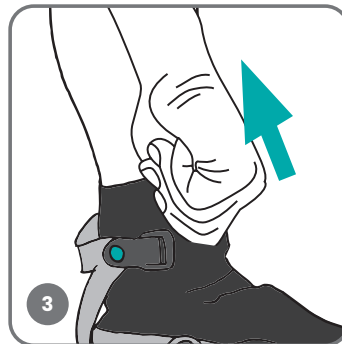


Bruksanvisning

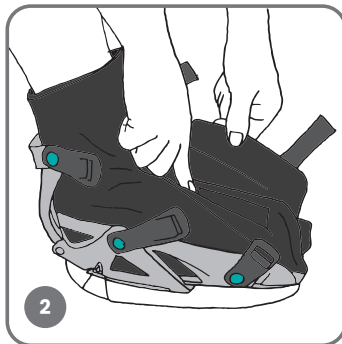

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder VACOpedes. Du hittar läsbara instruktioner för användning på vår OPED-hemsida.

Syfte: Ortos utformad för att immobilisera leder i den angivna positionen och tillhandahålla funktionell behandling av skador i mellanfoten och framfoten.

VACOpedes kräver professionell och individuell anpassning till patienten av kvalificerad personal som har behörighet att anpassa och ge instruktioner om ortoser i enlighet med tillämpliga statliga föreskrifter. Detta är det enda sättet att säkerställa full prestanda för denna ortos samt maximal användningskomfort.

Säkerhetsinformation

- ⚠ Produkten är endast avsedd för användning på en enda patient.
- ⚠ VACOpedes är inte konstruerad för dynamiska påfrestningar såsom hopp och snabb gång. Om du ramlar med VACOpedes påmonterad, ska du omedelbart kontrollera VACOpedes gällande skador. Om VACOpedes-enheten är skadad kan det påverka din säkerhet.
- ⚠ Använd aldrig produkten över öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Om kraftig smärta, domningar eller känselförändringar inträffar eller om du upplever ovanliga reaktioner eller en obehaglig känsla när du använder enheten, ska du omedelbart kontakta din läkare eller en ortopedisk tekniker.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt har utformats för de angivna indikationerna och kan skadas av felaktig användning, t.ex. under sportaktiviteter, oförutsedda olyckor (t.ex. fall) eller kontakt med vätskor som är oförenliga med plast.
- ⚠ Rådfråga din läkare när denna produkt används i kombination med en annan medicinteknisk produkt.
- ⚠ Endast reservdelar och/eller utbytesdelar som godkänts av OPED GmbH får användas.
- ⚠ Observera trafiklagarna som gäller i ditt land.
- ⚠ Ej tillverkad med naturgummilätex. 
- ⚠ Kontrollera att produkten sitter säkert - annars riskerar du att snubbla! Sula: När tåsektionen är helt förlängd kan din gång ändras eller begränsas.
- ⚠ Inläggets fyllningar kan förskjutas. Därför rekommenderas det att du lossnar fyllningen varannan till var tredje dag och sedan jämnar ut den.
- ⚠ Denna produkt är avsedd att användas i högst 4 månader.
- ⚠ När du bär ortosen ska du se till att skorna är tillräckligt höga på den motsatta sidan eller att sulan höjs för att kompensera för skillnaden i höjd.

Hur man sätter på ortosen (instruktionsvideo finns på app.oped.de)

Innan ortosen sätts på

Sätt på understrumpan: Öppna strumpan brett överst för att enkelt kunna låta den glida på foten. Dra sedan strumpan uppåt.

Öppna remmarna och ta bort innerskon från höljet. Öppna innerskon. Innan du sätter på innerskon ska du knåda den i sul- och fotledsområdet så att fyllningen luckras upp, och sedan jämna ut den för att säkerställa jämn fördelning (fig. 1). Placera foten allra längst bak i innerskon och stäng kardborrefästanningarna (fig. 2).

Kardborrens placering:

Kardborren fäster vid innerskons hela yttre yta. För in foten med innerskon i höljet och dra den en kort gång uppåt (fig. 3). Placera foten med innerskon allra längst bak i höljet. Sätt fast det främre fodralet (fig. 4) (framsida: filkar i det övre höljet och stäng remmen för hand och i den utsträckning smärtan tillåter (fig. 5). Se till att remmen är fasthakad under klaffen på det främre fodralet i tåområdet för att förhindra att det glider (fig. 6). Det tar ett tag innan fyllningen i innerskon är perfekt anpassad till fotens anatomi. Dra åt remmarna igen vid behov.

Inpassning och byte av sula

Ta bort sulan

Tryck samtidigt på båda upplåsningsknappar (fig. 7).

Passa in sulan

Placera VACOpedes-enheten rakt och centrerat på sulan innan du trycker den mot sulan (du kan höra ljudliga klick (fig. 8). Kontrollera att sulan sitter ordentligt.

Justering av sulans längd

Ta bort sulan (se Passa in sulan) och tryck på upplåsningsknappen. Dra tåsektionen till önskad längd (fig. 7). Flytta tåstycket till önskad position.

Patientinformation

Tryckpunkter/problemösning

Knåda innerskons sul- och fotledsområde så att fyllningen luckras upp, och jämna sedan ut den för att säkerställa jämn fördelning.

Om kardborrefästanningarna på undersidan av interiören har lossnat och båda delarna måste anslutas igen: (fig. 9)

- Stäng först kardborrefästanningarna bak i mitten (se 1).
- Stäng sidokardborrefästanningarna (se 2 och 3).

Se till att kardborrefästanningarna inte är sneda utan placerade enligt bilden.

Dusch/tvätt

Vi rekommenderar att du använder ett duschskydd när du duschar. Om ortosen eller dess fodral blir våta, måste de torkas.

Sömn

Innan du sover ska du placera en handduk under enheten så att lakanet inte tar skada.

Produkttegenskaper

Storlekar

Produkten kan bäras på vänster eller höger sida.
Rekommendation: Vid storleksgränssnitten mellan versionerna Small/Medium och Medium/Large, ange om möjligt storleken på de mindre VACOpedes-enheterna.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	40 – 44	45 – 49
UK	2 ½ – 6	6 ½ – 10	10 ½ – 14
US (M)	3 ½ – 6 ½	7 ½ – 10 ½	11 ½ – 14 ½
US (W)	4 ½ – 7 ½	8 ½ – 11 ½	12 ½ – 15 ½

Indikationer

- Metatarsala frakturer I – IV
- Hallux valgus/rigidus
- Artroses i metatarsala leder
- Hammar- och klotår
- Lapidus-operation

Kontraindikationer

Inga kända

Information om skötsel/rengöring/desinfektion sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick.

Rengöringsanvisningar för patienter:

- Nedre hölje: Diskmaskin vid 60 °C 
- Remmar: Tvättmaskin vid 40 °C 
- Innersko: Tvättmaskin, 40° C. Tvätta separat med ett mildt rengöringsmedel och i en sluten tvättpåse. 
- Understrumpa: Tvättmaskin, 30°C. 
- Desinfektion: Torka av enheten med ett plastkompatibelt desinfektionsmedel. 
- Torkning: Lufttorka, torka inte i en torktumlare. 
- Sterilisering: Denna medicintekniska produkt är inte lämplig för sterilisering. 

Tillbehör

Om inte tillbehöret inte ingår i leveransen kan det beställas från OPED GmbH.

- Försegling
- Klickdisk

Tekniska data/parametrar

Material i enheten:

Hårda skal (PP); rem (PP-tyg); yttersula (EVA); främre lock (EVA/PP); fodral med hysa fram (POM).
Insida: Polyester (PES), polyamid (PA), polyuretan (PU), etylvinylacetat (EVA), EPS

Transportförhållanden/förvaringsförhållanden/bortskaffande

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas från direkt solljus.



Tyskland: Denna medicintekniska enhet är en uthyrningsprodukt och måste återlämnas till OPED!

Schweiz: Den medicintekniska enheten kan återlämnas till OPED.

Övriga länder: Kassera den medicintekniska produkten i behållaren för brännbara rester eller hushållssoporna.



Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande bestämmelser. OPED:s villkor och bestämmelser gäller också, där så är tillåtet.

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Endast allvariga händelser som kan leda till en betydande försämring av hälsan eller dödsfall bör rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten. Allvariga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team