

VACO®ped och VACO®pedes  
med den nya XELGO-teknologin



# XELGO Teknologin

XELGO-inlägget är en innovativ uppdatering av Oped's pärl-teknologi. XELGO-inlägget har små kulor inbäddade i dynor som binds samman genom viskösa vätskebryggor. När foten sjunker ner i inlägget anpassar det sig perfekt efter patientens unika anatomi.

## Enklare att hantera

- Ingen vakuumsugning
- Inlägget och den inre kuldynan separeras inte vid tvätt
- Enkelt att forma och justera inlägget, vilket ger bättre anpassning under läkningsprocessen

## Tidsbesparande

- Kräver mindre tid från både vårdpersonal och patient

## Förbättrad bärkomfort

- Samma gipstabilitet som VACOped tack vare pärl-teknologin, men med förbättrad komfort vid användning.



# VACOped<sup>®</sup> by OPED

# VACOpedes<sup>®</sup> by OPED

## Produkttegenskaper

- 1 Vakuumdyna **VACO12**<sup>®</sup> individuellt anpassningsbar för svullnader och atrofi.
- 2 Hög ram för mycket god stabilitet.
- 3 **XELGO** Teknologin anpassar sig automatiskt efter anatomin, omsluter svullnad samtidigt som den avlastar trycket och säkerställer en perfekt passform.
- 4 Rullsula/step-in-sula för ett optimalt gångmönster. Avtagbar för bättre hygien.
- 5 Förlängningsbar tåplattform för optimalt skydd av framfoten.
- 6 Justerbar led:  
ROM (VACOped): -15° to +30°



## DRYCLIM<sup>®</sup> säkerställer luftcirkulation

DryClim<sup>®</sup>-materialet garanterar andningsförmåga och ventilation.



## Rörelse som gör skillnad – det smarta 2-i-1 systemet

Den enda bevisade gipsstabila ortosen med VACO12-teknologi. Det patenterade rörelseomfånget (ROM) är enkelt att ställa in och möjliggör fixering samt dynamisk behandling.




## Avancerad behandling av hälsenerupturer (ATR)

- Snabb och enkel justering till en äkta equinus-position (30° plantarflexion) för den initiala fasen
- Flexibelt justerbar i steg om 5° från -15° till +30° för dynamisk behandling
- Avancerad teknologi som resulterar i bättre kliniska resultat och även möjliggör konservativ behandling



## VACOped - för en äkta Equinus-position

ROM möjliggör mer än 30° plantarflexion i en fixerad position under den initiala fasen av hälsenerupturens läkning.

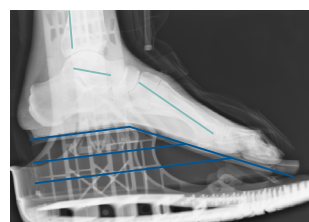

Ortos med kil.



Vakuuortos (VACOped)

Early Protected Weightbearing for Acute Ruptures of the Achilles Tendon: Do Commonly Used Orthoses Produce the Required Equinus?  
P. Ellison et.al. Aintree University Hospital. The Journal of Foot & Ankle Surgery 2017, vol. 56, issue 5, pp. 960-963.

# EVEN<sup>®</sup> up by OPED

## Justera höfterna och korrigerar benlängdsskillnad

- Hjälper till att lindra höft-, rygg- och knäsmärtor
- Kan minska behovet av korrigerande fysioterapi efter användning av ortos
- Hjälper till att skapa ett mer naturligt gångmönster
- Lätt att sätta på över sko
- Finns i 3 storlekar



Upplev större komfort vid användning av ortos!

## Storlekar

Art.nr.	Modell	Storlek	Skostorlek
476620011	VACOped Xelgo	Small	35-40
476620012	VACOped Xelgo	Medium	40-45
476620013	VACOped Xelgo	Large	45-50
476320011	VACOped	Small	35-40
476320012	VACOped	Medium	40-45
476320013	VACOped	Large	45-50
476330011	VACOped Short	Small	35-40
476330012	VACOped Short	Medium	40-45
476330013	VACOped Short	Large	45-50
476630011	VACOpedes Xelgo	Small	35-40
476630012	VACOpedes Xelgo	Medium	40-45
476630013	VACOpedes Xelgo	Large	45-50
476340011	VACOpedes	Small	35-40
476340012	VACOpedes	Medium	40-45
476340013	VACOpedes	Large	45-50
476350011	VACOcast	Small	35-40
476350012	VACOcast	Medium	40-45
476350013	VACOcast	Large	45-50
476400011	EVENup	Small	34-38
476400012	EVENup	Medium	39-43
476400013	EVENup	Large	44-46





Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Finland  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no