



## Användarinstruktioner- Svenska (SV)



[www.3pp-eifu.com](http://www.3pp-eifu.com)

**Beskrivning:** Oval-8 Finger Splints är en gjuten plastbit som är designad för att passa på fingret som ett stöd, skydd och för att hålla ihop fingrarna. Dessa är tillgängliga i 14 storlekar för att passa alla fingerstorlekar. Oval-8 Finger Splints är vattentäta och kan användas även i väta.

**Avsedd användning:** Oval-8 Finger Splints är designade för att passa 3 kontrollpunkter runt ett finger för att hålla knogen utsträckt, förhindra eller begränsa rörelserna för skydd och tillåta läkning. Enheten kan användas för att hantera flera fingrar beroende på var och hur den sitter på fingret.




**Försiktighetsåtgärder:** Får inte användas på öppna sår. Ej för användning om ständig svullnad. Får inte användas på tårna. Enheten kan förorsaka irritation eller tryck på fingret. Sluta att använda den om irritation eller tryck uppkommer. Kontakta din vårdgivare om irritationen kvarstår. Följ rengöringsriktlinjerna enligt schemat.


**Försiktighet:** Får inte användas av barn under 5 års ålder. Kan förorsaka kvävning om den sväljs ner.

**Anvisning:** Hur ska man bära Oval-8 Finger Splints för att hantera olika felställningar i fingrarna.


1. Boutonniers deformitet

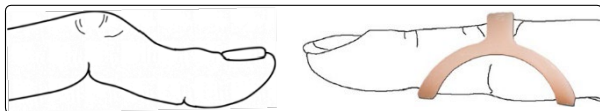


4. Mallet Finger

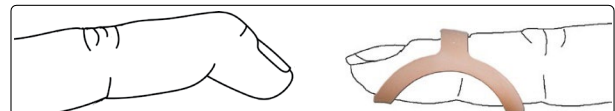


2. Krökta fingrar

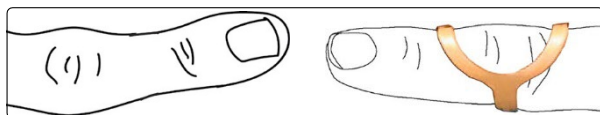


5. Svanhalsdeformitet

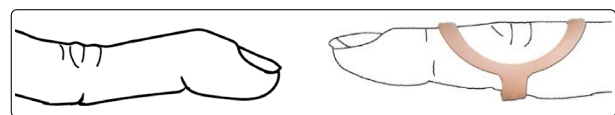



3. Triggertumme

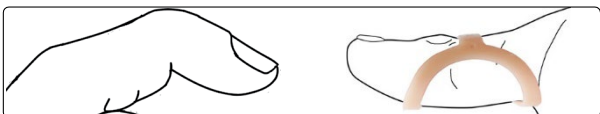

6. Triggerfinger

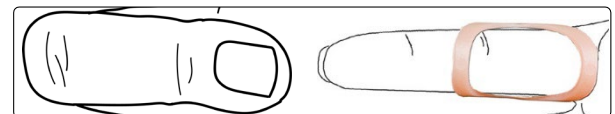

**OBS!** Oval-8 Splints sitter tajtare eller lösare beroende på vilken av ändarna som träs på fingret först. Plus +-tecknet indikerar den lösare änden.

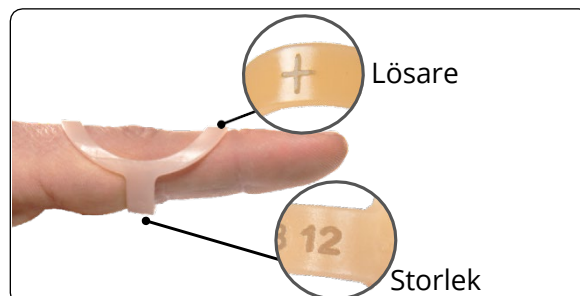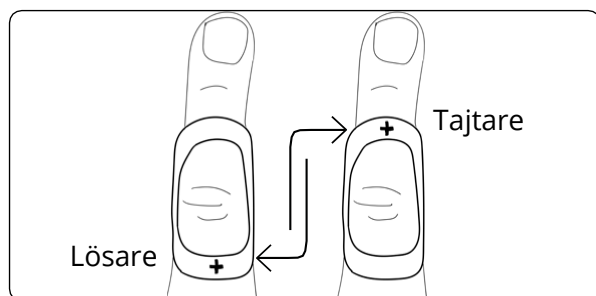

**Hur man tar mått för en Oval-8 Finger Splint:** Instruktioner om hur man mäter fingrar för korrekt storlek på produkten kan ses på sidorna 3 & 4.

**Hur får man tag i den:** Produkten tillverkas av ren polypropylen. Produkten är latexfri. Används inte om enheten är skadad. Förvaras på en sval, torr plats. Den är tillgänglig i 14 storlekar, förpackad i olika kvantiteter. Förpackningsalternativ finns på sidan 4.

**Rengöring:** Handtvätt med tvål och vatten och lufttorkning av produkten regelbundet. Desinficera produkten med 70 % isopropylalkohol eller 10 %-igt blekningsmedel.

**Omhändertagande:** Produkten är avsedd att återanvändas av samma person flera gånger. Släng enheten så snart den uppvisar tecken på överdrivet slitage och byt ut den mot en ny produkt vid behov.

**När ska man uppsöka läkare?** Rådgör med sjukvården om några biverkning uppkommer så som hudreaktioner eller förändrat tillstånd.

**Att observera för användare och/eller patient:** I händelse av en biverkan relaterad till enheten, ska denna avlägsnas och rapporteras in till leverantören och respektive ansvarig myndighetsrepresentant i respektive medlemsstat där användaren är bosatt.

**Distributörer:** [www.3pp-eifu.com/#distributors](http://www.3pp-eifu.com/#distributors)

**Etikettsymboler:** Alla symboler som används på produktetiketten eller i produktlitteraturen Definieras i 3-Point Produktsymbolistan här: [www.3pp-eifu.com/#symbols](http://www.3pp-eifu.com/#symbols)



3-Point Products, Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393



Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)




Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug



## Hur man mäter fingrarna inför en Oval-8 Finger Splint

Oval-8 Finger Splints är en medicinsk apparat och är generellt sett väl anpassad för bästa möjliga resultat. Korrekt storlek är beroende av vilken typ av fingerproblem som finns och var bandet kommer att sitta. Vänligen följ instruktionerna

### Du kommer att behöva:

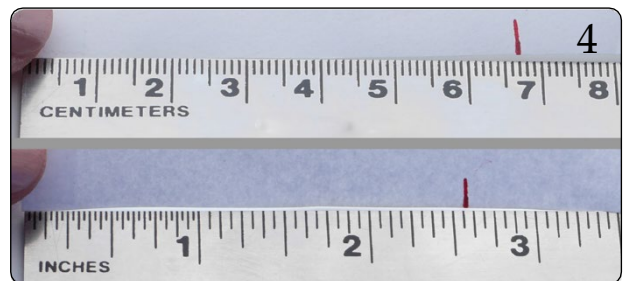



## Oval-8 Storleks- & förpackningskarta

| Oval-8 Storlekskarta (English) |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Oval-8 Storlek                 | Mått i tum | Mått i centimeter |
| 2                              | 1-3/4"     | 4,3               |
| 3                              | 1-13/16"   | 4,5               |
| 4                              | 1-15/16"   | 4,95              |
| 5                              | 2-1/6"     | 5,27              |
| 6                              | 2-3/16"    | 5,7               |
| 7                              | 2-5/16"    | 5,86              |
| 8                              | 2-7/16"    | 6,14              |
| 9                              | 2-1/2"     | 6,35              |
| 10                             | 2-11/16"   | 6,82              |
| 11                             | 2-13/16"   | 7,09              |
| 12                             | 2-15/16"   | 7,4               |
| 13                             | 3"         | 7,65              |
| 14                             | 3-3/16"    | 8,09              |
| 15                             | 3-1/4"     | 8,2               |

| Oval-8 Förpackningskarta |                        |                         |                         |   |  |   |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|---|
| Oval-8 Storlek           | En (1) per förpackning | Tre (3) per förpackning | Fem (5) per förpackning | Graderad förpackning<br>tre (3) storlekar | Oval-8 Kit<br>Klinicklåda med 44 splintar<br>Kvantitet per storlek |   |
| 2                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 2-3-4                                     | Storlek 2 & 15   | 1 |
| 3                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 4-5-6                                     | Storlek 3-4 & 13-14  | 2 |
| 4                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 6-7-8                                     | Storlek 11 & 12  | 3 |
| 5                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 8-9-10                                    | Storlek 5 & 10   | 4 |
| 6                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 10-11-12                                  | Storlek 6-7-8-9  | 5 |
| 7                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 13-14-15                                  |  |   |
| 8                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       |   |  |   |
| 9                        | ✓                      | ✓                       | ✓                       |   |  |   |
| 10                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       | Kombinationsset<br>fem (5) storlekar      | Storleksset<br>en (1) av varje storlek - 14 totalt                 |   |
| 11                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 2-3-4-5-6                                 |  |   |
| 12                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 5-6-7-8-9                                 |  |   |
| 13                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 8-9-10-11-12                              |  |   |
| 14                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       | 11-12-13-14-15                            |  |   |
| 15                       | ✓                      | ✓                       | ✓                       |   |  |   |

Alla förpackningar kanske inte är tillgängliga från alla återförsäljare