

# 51602 - Jura Handflatsskydd

## Produktbeskrivning

Designad för att tillåta full fingerrörelse samtidigt den reducerar kontrakturer och hudskador/nedbrytning i handflatan.

## Användningsinformation (se bilder)

1. Öppna kardborrebandet och montera handflatsskyddet med patientens tumme genom tumhålet enligt bilden. (Fig. 1)  
Jura-etiketten ska synas på utsidan.
2. Fäst kardborrebandet över handrygg och fäst mot det hårda kardborrebandet. Klipp bandets längd vid behov. (Fig. 2)
3. För att sträcka ut fingrarna ytterligare och hjälpa till att släppa ett hårt grepp, sätt in ett cylindriskt skum eller annat material i öppningen mellan handflatan och polstringen.
4. Obs: Se till att det hårda kardborrebandet inte är i kontakt med huden. Kontrollera att det är rätt ortos för rätt sida (vänster / höger).

## Storlekar och Sida

Storlek: Omkrets handled

Vänster: Universal

Höger: Universal

## Indikationer för användning

Handflatsskyddet kan ge lindring för krokiga fingrar; handkontrakturer och kramper. Handflatsskyddet ger en dämpningsdyna för fingrarna att rulla sig på, vilket förhindrar fingrar och naglar från att gräva in i handflatan, samtidigt som de ger fingrarna stöd.

## Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.
- All känd allergi och/eller överkänslighet mot något material anges i produktsammansättningen.
- Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller.
- Försiktighet bör iaktas om det förskrivs till patienter med diabetes, vasculära problem och neuropati.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar att den första utprovningen av denna enhet utförs av en lämpligt kvalificerad sjukvårdspersonal som kommer att ge råd om användningstid.

- Läs noga igenom alla instruktioner och varningar före användning.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller något annat ämnen har applicerats på det drabbade området.
- Återanvänd inte till annan patient, om du gör det riskerar du korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller, speciellt för patienter med diabetes, vasculära sjukdomar och neurologiska skador.
- Om några biverkningar uppstår, vänligen sluta använda och kontakta din vårdpersonal eller leverantör av denna produkt.
- Enhetens hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, till exempel föremål med vassa kanter eller skada på kardborrebanden. För att förhindra detta genom att kardborrefästen alltid ska fästas i materialet när enheten inte används eller när den tvättas.

## Tvätt- och skötselråd

1. Stäng kardborrebandet.
2. Handtvätt i kallt vatten med mildt rengöringsmedel.
3. Skölj och lufttorka.
4. Får inte centrifugeras eller torktumlas.
5. Använd inte sköljmedel.
6. Kontrollera om det finns skada på produkten som kan påverka användningen.
7. Kontrollera med jämna mellanrum att kardborrebandet fungerar som det ska.

## Produktsammansättning

Polyester; nylon.

## Förvarings- och transportförhållanden

Förvaras på en sval, torr plats utom direkt solljus, i originalförpackning.

## Återvinning och kassering

Förpackningar och beståndsdelar bör återvinnas eller säkert kasseras i enlighet med lokala eller nationella lagar.

## Allvarlig incident

Rapportera alla allvarliga incidenter till tillverkaren och behörig myndighet i EU-medlemsstaten eller det land där du bor.

