


Patientguide S.O.T tumortos

UTPROVNING


För att ortosen ska fungera optimalt är det viktigt att överdraget är justerat så att det sitter bra.

Fäst överdraget successivt, låt bandet vid tummen (1) sitta fast från början.


Fäst sen flikarna i tur och ordning, flik 2 och sen flik 3. Efterjustera så att ortosen sitter bekvämt.

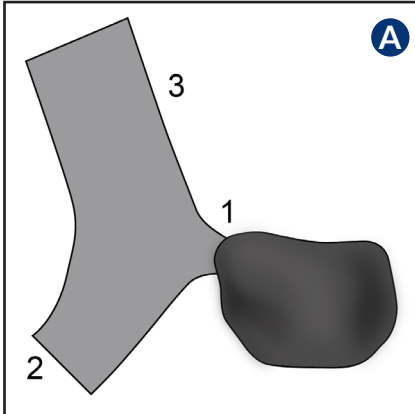

Öppna de breda bandflikarna 2 & 3 och låt den smala fliken 1 sitta kvar.

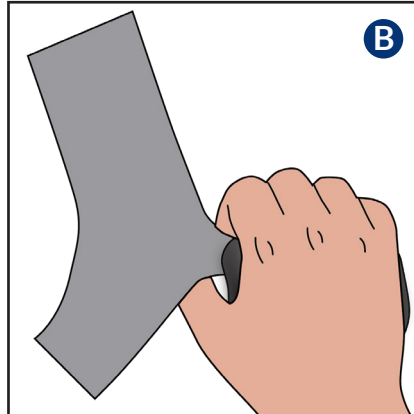


Placera handen på ortosen.

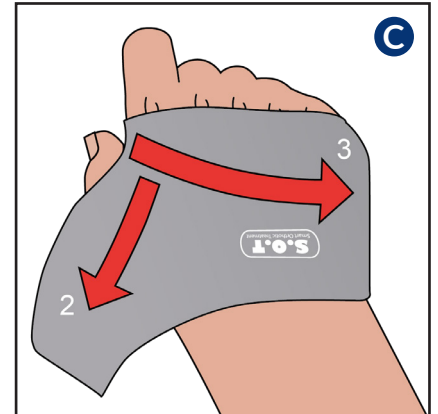


Lägg bandet över handen och fäst bandflik 3 och sedan bandflik 2 mot Velcon på handens insida. Efterjustera bandflik 1 och 2 så att ortosen sitter bekvämt.

TA PÅ ORTOSEN

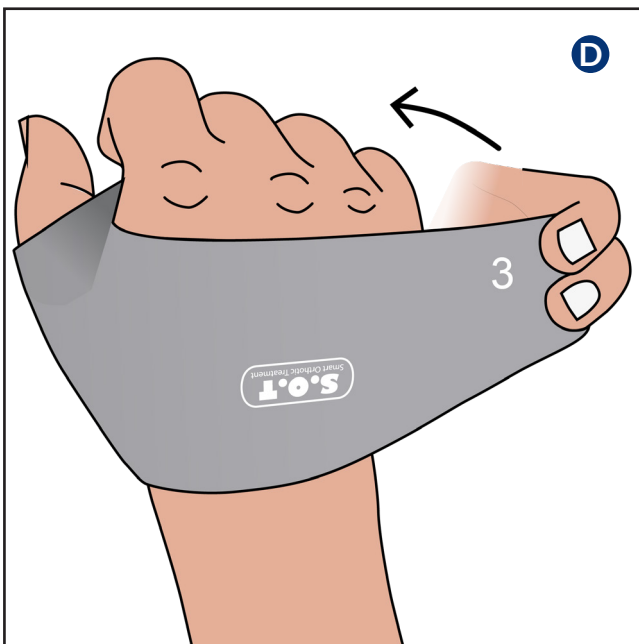

TA AV ORTOSEN

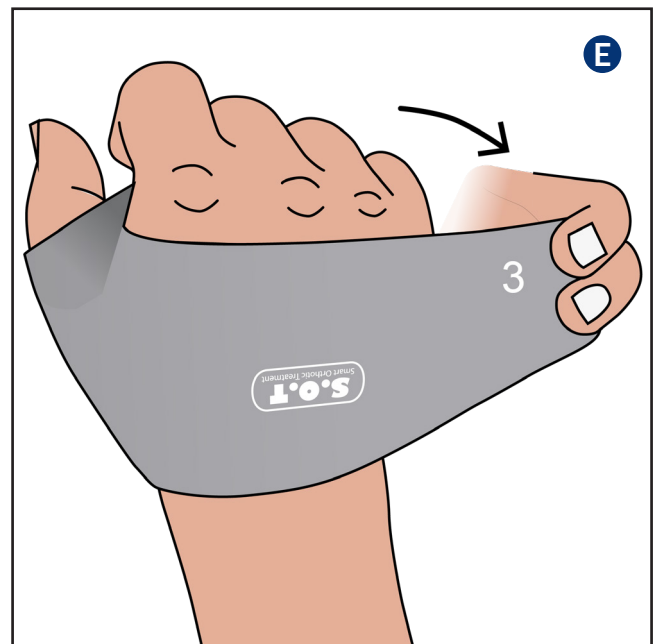

Vid av- och på-tagning efter utprovningen är gjord bör bandet enbart öppnas på lillfingersidan (bandflik 3)

Ortos ska användas:

Bra att tänka på:

SKÖTSELRÅD: Tvätta den kompletta monterade produkten i en tvättpåse 40°C skontvätt. Torka liggande. Unvik sköljmedel. Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Om något problem uppstår kontakta:

Namn_____

Telefon:_____