

Catalyst Propel™ OA

Denna fyrapunkts-knäortos är avsedd för behandling av mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet eller efter skada för att reducera belastningen mot leden. Ortosen har den unika Active Thigh Cuff™ (ATC) lösningen på lårets framsida. Detta är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som möjliggör den ultimata upphängningen. Ger skydd och komfort genom att röra sig med musklerna igenom hela rörelsen. Stark men lågprofil aluminiumram av högsta kvalitet ger ett överlägset skydd.

Ortosens Q-led justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. Catalyst Propel™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområde: Mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet. Efter skada för att reducera belastningen mot leden.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3	
5500I	Catalyst Propel™ OA	Small	Vä/Hö	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	
5500I	Catalyst Propel™ OA	Medium	Vä/Hö	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	
5500I	Catalyst Propel™ OA	Large	Vä/Hö	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	
5500I	Catalyst Propel™ OA	X-Large	Vä/Hö	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	
5500I	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	Vä/Hö	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	
55009	Extra Polstring	Small	Vä/Hö	-	-	-	
55009	Extra Polstring	Medium	Vä/Hö	-	-	-	
55009	Extra Polstring	Large	Vä/Hö	-	-	-	
55009	Extra Polstring	X-Large	Vä/Hö	-	-	-	
55009	Extra Polstring	XX-Large	Vä/Hö	-	-	-	
55010	Extra bandset	Small	-	-	-	-	
55010	Extra bandset	Medium	-	-	-	-	
55010	Extra bandset	Large	-	-	-	-	
55010	Extra bandset	X-Large	-	-	-	-	
55010	Extra bandset	XX-Large	-	-	-	-	
5501I	PCL Band	35 cm	-	-	-	-	
5501I	PCL Band	43 cm	-	-	-	-	
5501I	PCL Band	50 cm	-	-	-	-	