

CAMP®



 ascender®

Innovativ & helt unik  
POST-OP  
KNÄORTOS  
med alla funktioner  
som du kan önska!

# ascender®



Ascender® är en teleskopisk (44-70 cm) postoperativ knäortos med inställning mellan -10° (hyperextension) och 70°. Inställningen justeras enkelt genom att lyfta och flytta stopparna i leden. Leden kan även låsas i fem olika lägen; -10° (hyperextension), 0° (neutral), 10°, 20°, 30° flexion.

Leden kan säkras extra genom att sätta in en **”Anti-tamper låsning”** ovanför själva stoppet. Detta måste sen klippas bort med sax för att öppna inställningen.

Varje skena kan justeras till önskad längd individuellt. På varje skena finns en hake som öppnas. Skenan har tydliga markeringar för att säkerställa att det är samma längd på den laterala och mediala skenan.



Den mjuka och följsamma polstringen har anti-glid material på insidan. Bandens längd kan enkelt justeras genom att lossa Y-tabben och klippa bandet till önskad längd. Banden låses med extra låsclips för att hållas på plats under utprovningen. Ortosen stängs med kraftiga spännen som hakas fast.

Polstringen och banden kan tvättas för hand i ljummet vatten med en mild tvållösning. Universalmodell som passar både vänster och höger. En storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Längd
475400000	Ascender post-op knäortos	En storlek	Bilateral	44 – 70 cm
475410000	Komplett polstrings- och bandset	En storlek	Bilateral	
475420000	Extra polstringsset	En storlek	Bilateral	
475430000	Extra bandset	En storlek	Bilateral	