




Life Changing Innovation

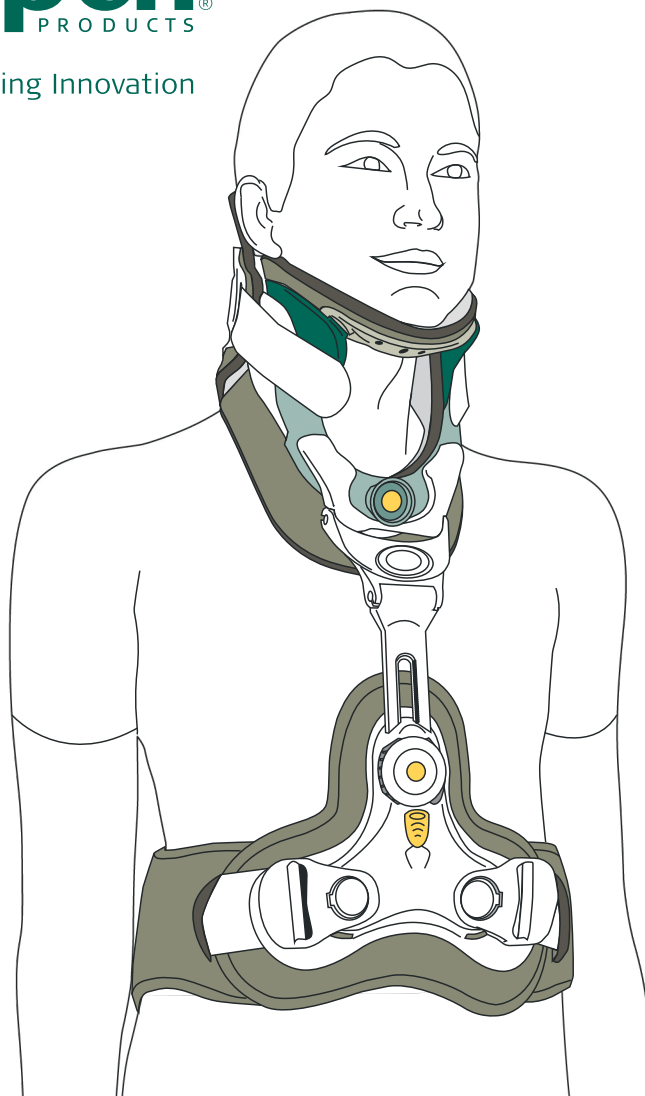

Aspen Vista™ CTO4

Patienthandbok

Patient Information

Ta med alla informationsblad och utskrivningsdokument om du återvänder till sjukhuset eller läkarmottagningen/kliniken för uppföljande vård. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller den person som har anpassat din halskrage.

PATIENTNAMN

DATUM

SJUKHUS/ARBETSPÅS

STAD



Life Changing
Innovation

Innehållsförteckning

Introduktion **1**

Applicering av ortosen **3**

Montering/borttagning av den främre panelen **8**

Montering/borttagning av den bakre panelen **9**

Tvättinstruktioner – borttagning av polster **11**

Tvätt och torkning av polster **12**


Byte av polster **13**

Patientanteckningar **15**

Garanti **16**

Introduktion


Din läkare har fastställt att användning av Aspen Vista CTO4 kommer att bidra till att förbättra ditt tillstånd. Dessa instruktioner beskriver de steg du behöver följa och vad du bör vara uppmärksam på för att korrekt kunna ta på och sköta din ortos hemma. Genom att följa dessa steg och din läkares anvisningar säkerställer du en trygg och effektiv behandling.

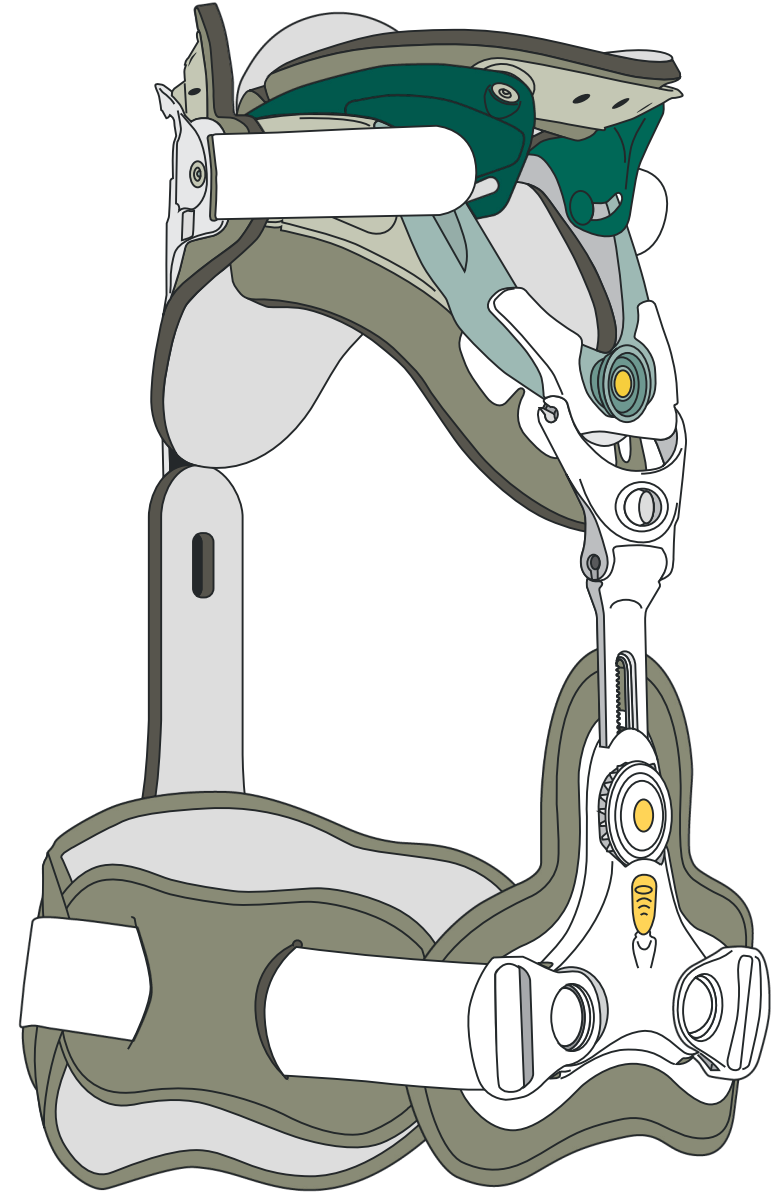


Applicering av ortosen

De olika delarna av din ortos kan ha modifierats för att skapa en anpassad passform utifrån dina specifika behov. För att säkerställa bästa möjliga resultat ska du inte ändra ortosen själv. Kontakta din vårdgivare eller den person som har anpassat ortosen om du har frågor eller funderingar kring ortosens placering eller passform.

Följande instruktioner hjälper dig att ta på ortosen i rätt position.

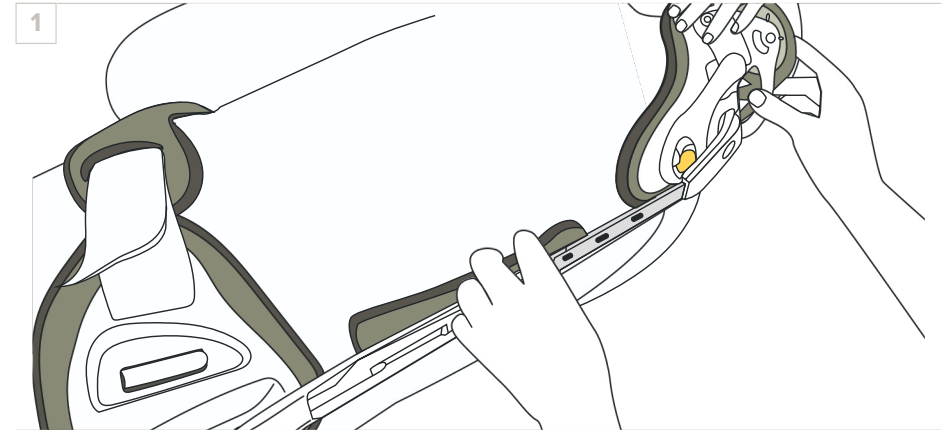


Med huvudet i neutralt läge, rulla patienten i sidoläge för att placera det bakre stödet och kragens ryggpanel. Kardborrebanden ska vara placerade mellan patientens öra och trapeziusmuskeln.

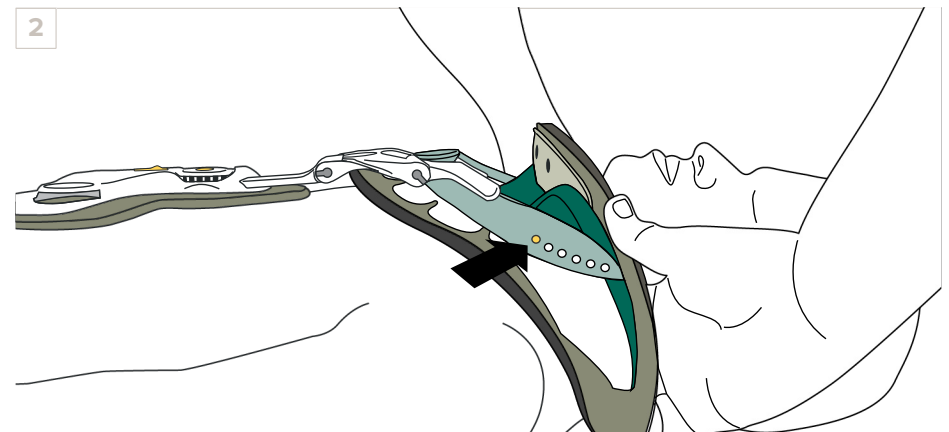


Placera kragens sidor upp över trapeziusmuskeln. Det är okej om hakstödet inte rör hakan.




Placera Vista MultiPost-halskragen enligt din läkares anvisningar för att uppnå bästa passform.

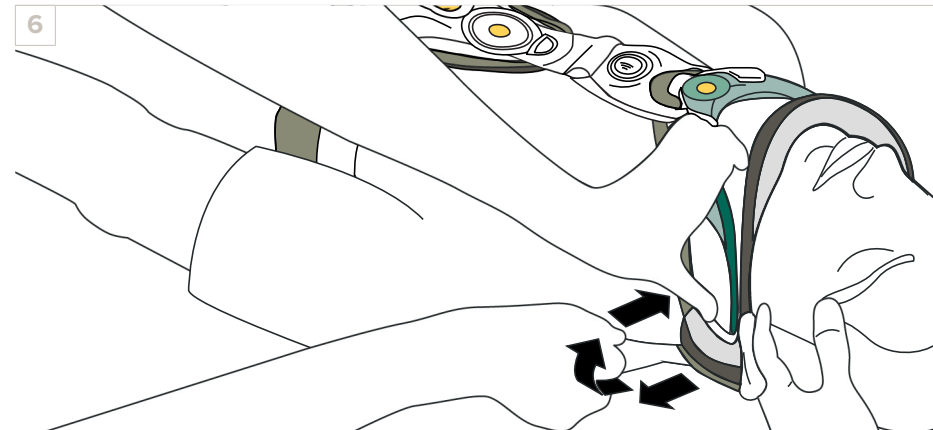


Dra åt båda kragens band.

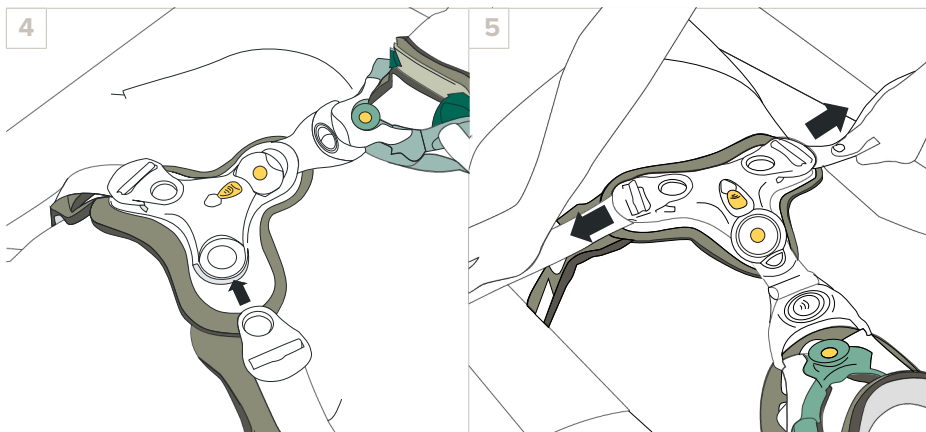

Fäst ryggspanelens på den främre delen. Dra i banden tills ryggspanelen sitter stadigt, justera polsterna för bästa komfort.

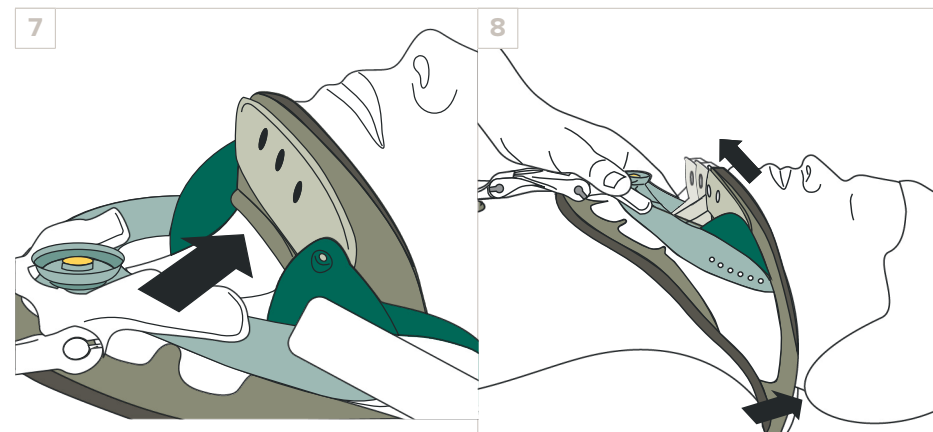



Kontrollera att baksidan av hakstödet inte trycker in mot halsen. Om den gör det, lyft upp de bakre ändarna av sidopanelerna från trapeziusmusklerna.

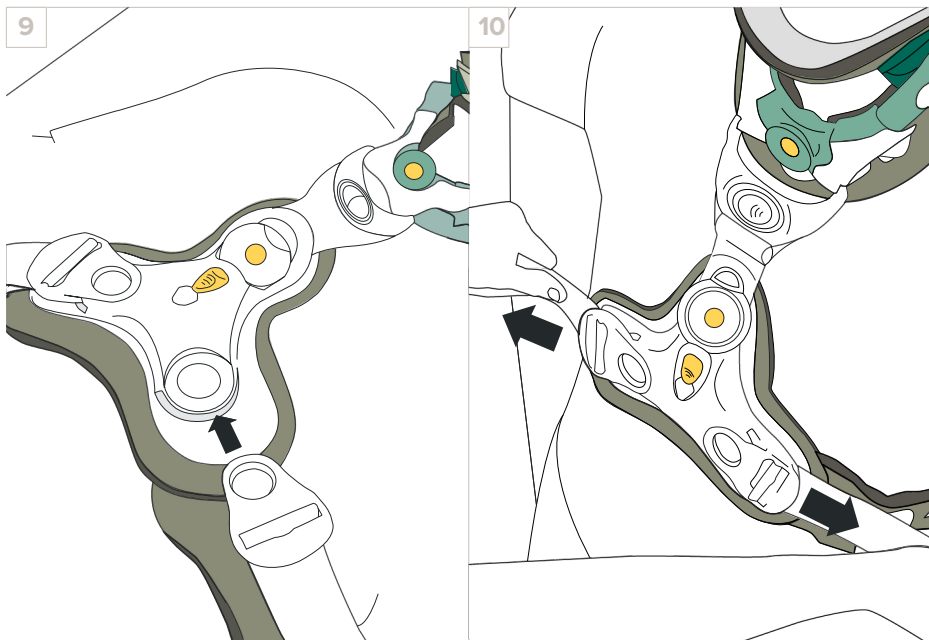

Kontrollera igen att banden på ländryggspolstret sitter bekvämt och säkert.

Montering/borttagning av den främre panelen

OBS: Din vårdgivare kan instruera dig att ta bort den främre panelen beroende på hur din behandling fortskrider.

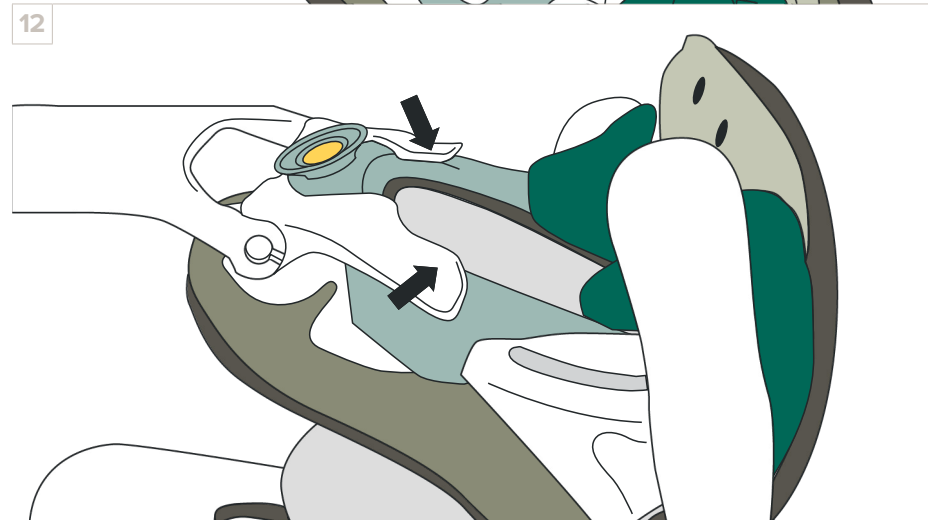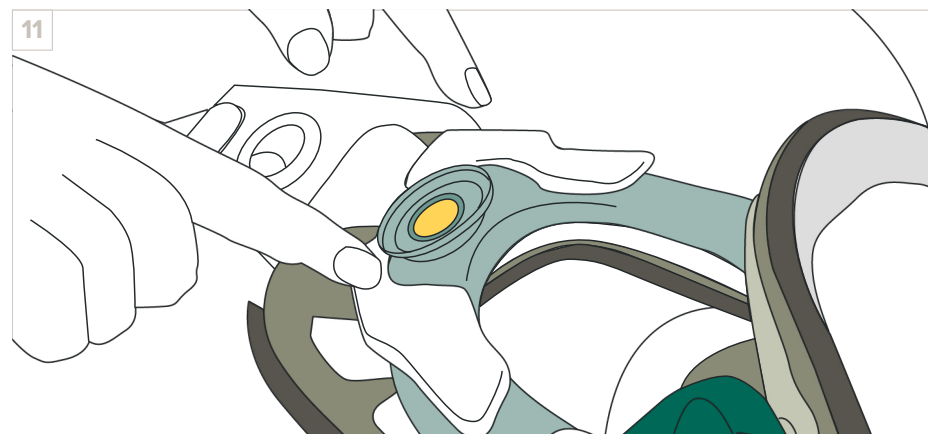


Använd pekfingrarna för att rikta in flikarna på det främre låset, som är placerat på Vista CTO:s främre panel, med spåren på framsidan av Vista-kragen och säkerställ att de klickar på plats. För att ta bort det, tryck helt enkelt in flikarna i varje ände av låset och dra bort det från kragen.

Montering/borttagning av bakre panelen


OBS: Din vårdgivare kan instruera dig att ta bort den bakre panelen medan du ligger på rygg i sängen.

13

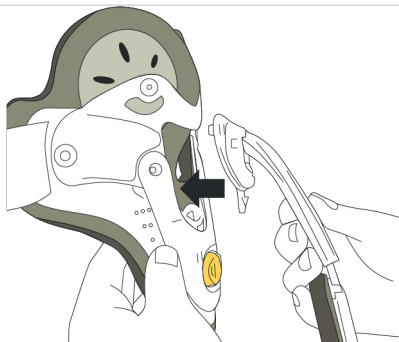


Rikta in de tre fästpunkterna med de tre öppningarna i Vista MultiPost-bakpanelen och tryck dem på plats.

14

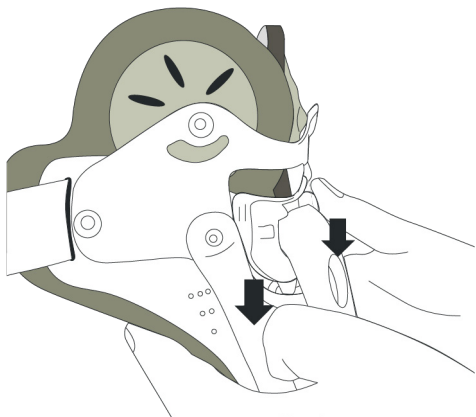


Tryck nedåt så att panelen låses på plats. Kontrollera att alla tre anslutningar sitter ordentligt fast

15

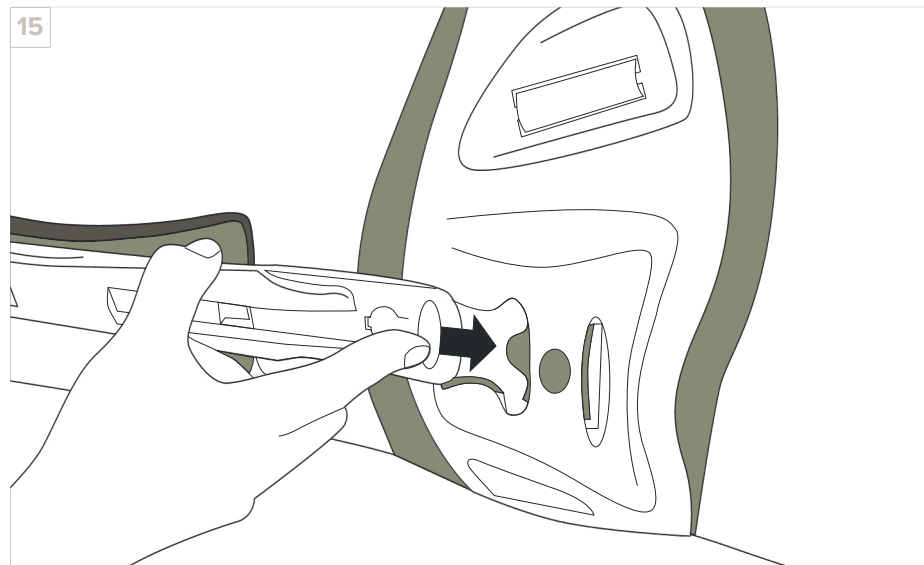

Skjut den bakre panelen in i spåret på ländbältets bakre panel tills att de klickar på plats.


16

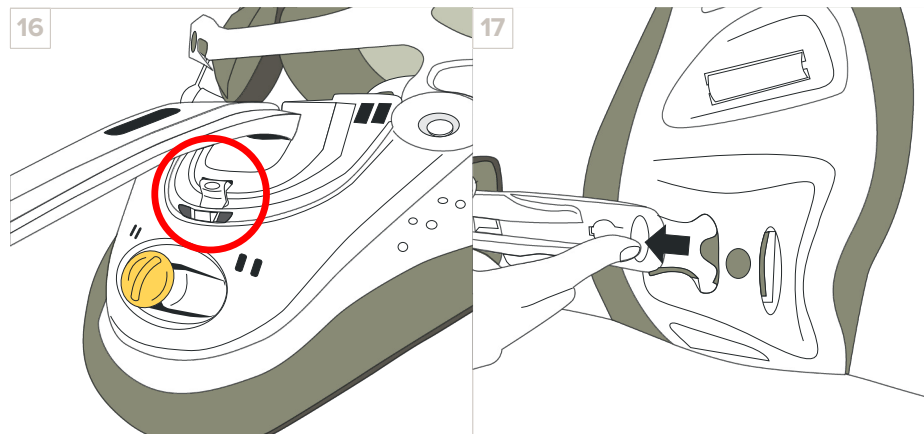


17

För att ta bort, tryck på knappen längst ner vid den bakre fästpunkten på både kragen och ländkudden och skjut uppåt.

Tvättinstruktion – Borttagning av polster

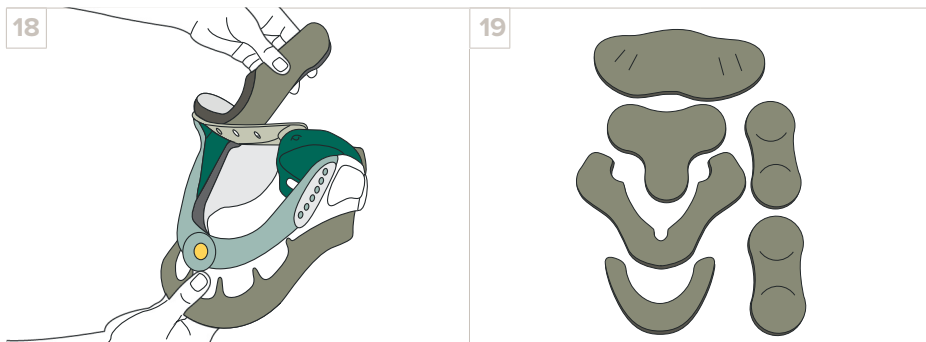


För att ta bort polstringen, dra dem enkelt loss från kardborrfästena som håller dem på plats mot plasten.

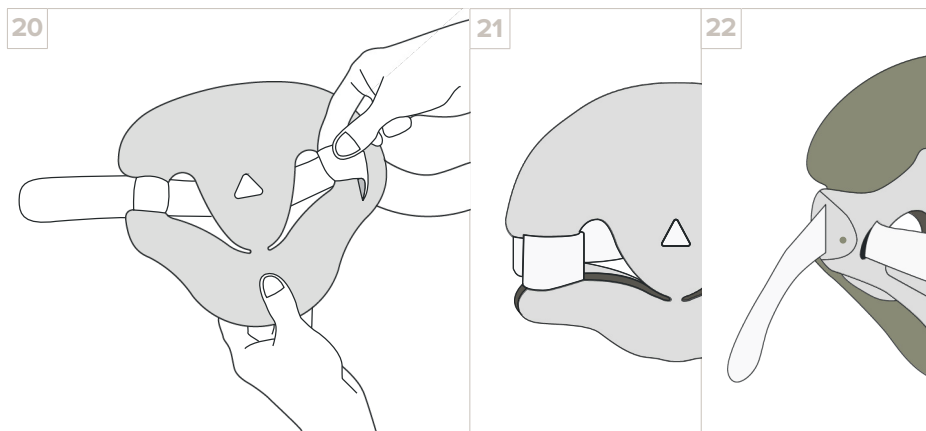


På en del polster måste du först trä ur banden på varje sida. För att göra detta, skjut banden genom öppningarna i polstringen och plastens ytterkant. Detta gäller för kragen och ländryggen.

Tvätt av polster

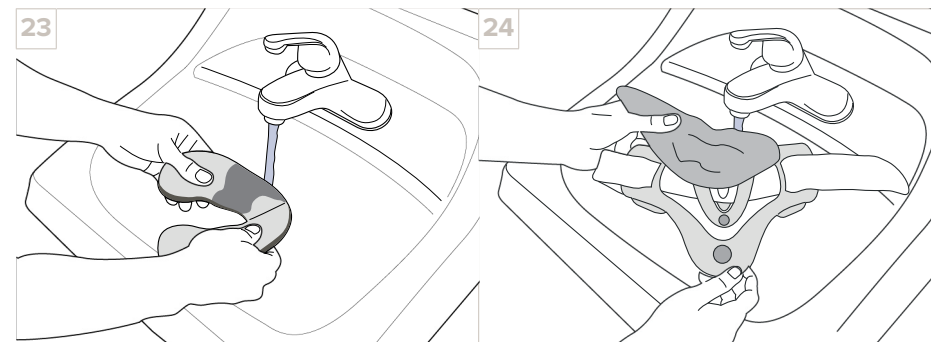

Handtvätta polstringen med mild tvål och varmt vatten. Tvätta inte i maskin och använd inte blekmedel. Skölj noggrant. Plastskalet kan torkas av med mild tvål och vatten. Skölj och torka med handduk innan polstringen sätts tillbaka.


Torkning av polster

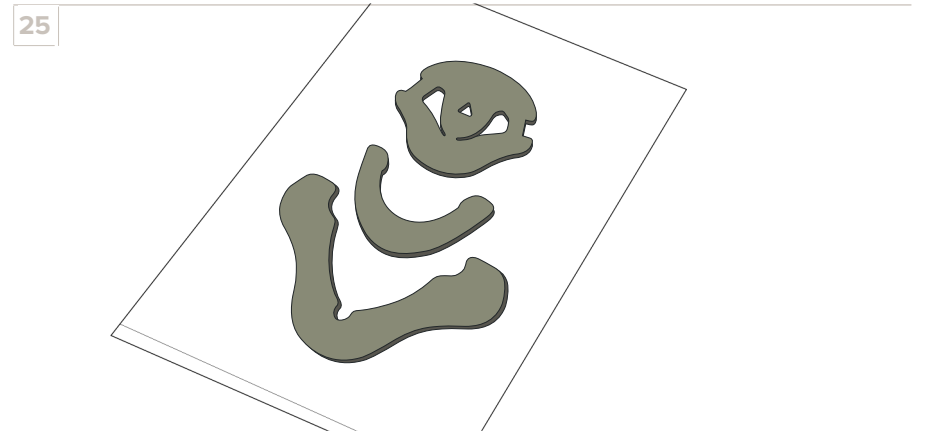

Pressa försiktigt ut överflödigt vatten genom att trycka polstringen mot en handduk. Låt dem sedan lufttorka helt på en handduk. Använd inte värme för att torka dem. Använd ersättningspolstring under torktiden.


Byte av polster

26

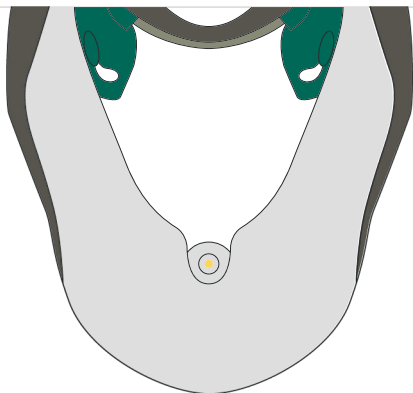


Alla polstringar är avsedda att ha den gröna sidan mot plasten och den vita sidan mot patienten. För att fästa polstringen igen, rikta in den gröna sidan mot de motsvarande kardborrfästena.

27

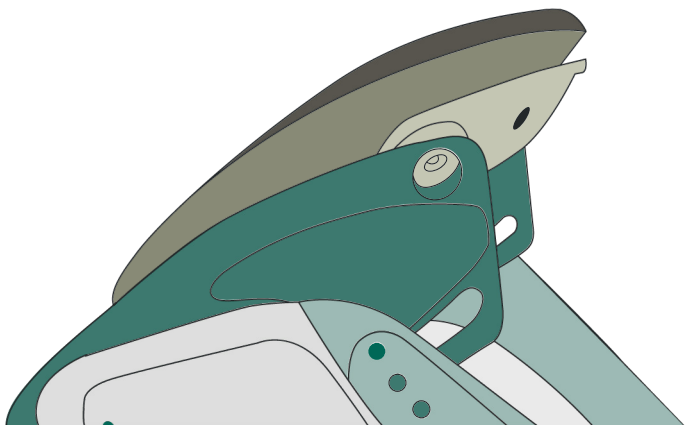


För den övre polstringen på kragen, se till att den täcker både fram- och bakkanten på plastdelarna.


28

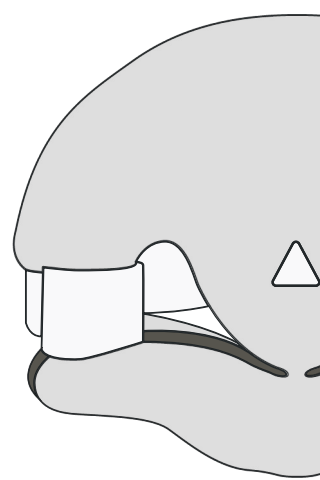

29

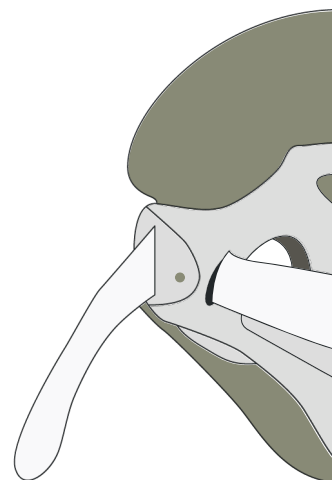

30

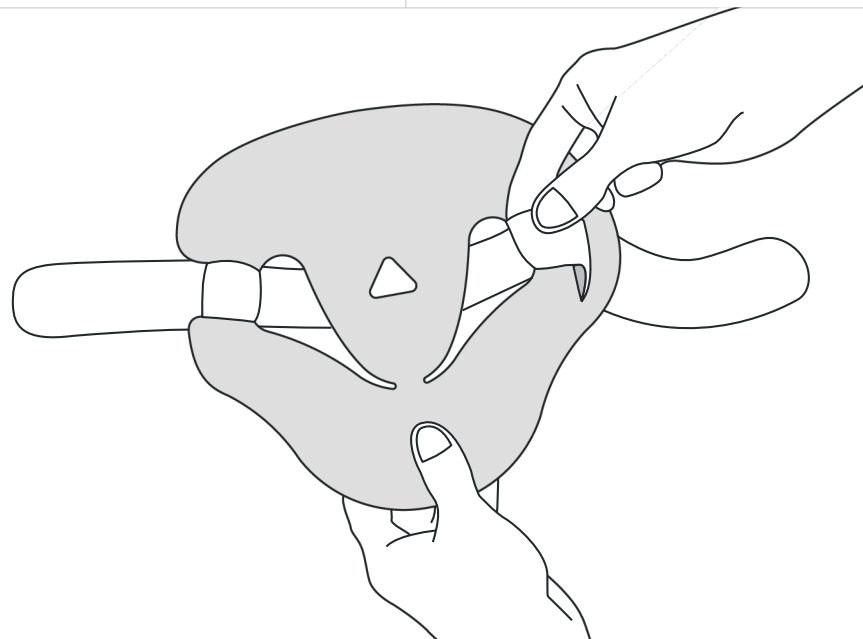

För att sätta tillbaka den bakre polstringen, börja med att fästa den gröna sidan av polstret mot kardborrfästena på ryggspanelen. När polstringen är rätt placerad mot plasten ska banden träs tillbaka genom öppningarna i polstringen och plasten.

Patient anteckningar

FÖLJ DIN LÄKARES INSTRUKTIONER.

BÄR ORTOSEN:

TIMMAR	GÅNGER
PER	PER
DAG	DAG

Ytterligare instruktioner:

Ett års begränsad garanti

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar den ursprungliga köparen av denna produkt att den är fri från material- och tillverkningsfel under ett år. Aspen Medical Products, LLC:s enda åtagande vid brott mot garantin är att reparera eller ersätta den defekta produkten eller de defekta delarna.

Aspen Medical Products, LLC har inget ansvar enligt denna begränsade garanti om:

(a) Produkten inte har köpts från Aspen Medical Products, LLC eller via dess auktoriserade distributionskanaler;

(b) Produkten har ändrats;

(c) Delar som inte tillhandahållits av Aspen Medical Products, LLC har monterats i produkten; eller

(d)Produkten inte används enligt Aspen Medical Products, LLC:s bruksanvisning.

OVANSTÅENDE ÄR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDEN VID FEL I FUNKTION ELLER DEFEKT I PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG ENLIGT DENNA ELLER NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJSKADOR.

DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISSTA ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, SAMT ALLA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FRÅN ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN, VILKA HÄRMED FRÅNSÄGS OCH UNDANTAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika delstater.

Varning: För att säkerställa korrekt användning, vänligen gå igenom allt material.

En lista över auktoriserade distributörer i ditt område finns tillgänglig på begäran.

