

Fast-Lite

Snabba, förformade lösningar för gipsrummet



Smidigare gipsning med Fast-Lite

Nya Fast-Lite är en innovativ förformad gipsskena som revolutionerar gipsningsprocessen genom snabbare och smidigare applicering. De förformade skenorna för armbåge och underben är tillverkade av X-Lite® Classic och kan enkelt värmas upp och formas direkt på patienten – vilket effektiviserar processen och sparar värdefull tid för både patient och gipstekniker/gipsare.

Lättviktigt, bekvämt och starkt

X-Lite® Classic materialet är starkt och stabilt, med en öppen struktur som låter huden andas.

Effektivt och tidssparande

Lätt och smidig att applicera. Härdar snabbt och ger fullt stöd till patientens extremitet inom 20 minuter.

Enkelt att individanpassa

Kan punktuppvärmas och trimmas för att möjliggöra exakt passform och individuell anpassning.

Stark och rigid

X-Lite® är ett mycket styvt material. Du kan använda avsevärt mindre material och ändå uppnå samma styrka som med andra sken- och gipsmaterial på marknaden.



Giftfri och miljövänlig

Långvarig immobilisering krävs ofta efter frakturer och operation.

Det är viktigt att välja rätt gipsmaterial för att uppnå bästa möjliga slutresultat och ge kliniker och annan medicinskt utbildad personal de bästa förutsättningarna att lyckas.

X-Lite® är en hållbar produkt som erbjuder patienten komfort genom att vara lätt och ventilerande, utan skadliga ämnen i materialet. Fast-Lite är tillverkad i X-Lite® som är framställt av bomull och impregnerat med en giftfri polymer, vilket säkerställer god komfort för patienten och en säker arbetsmiljö för personalen.



Så här används Fast-Lite

Fast-Lite är enkelt att använda och går snabbt att anpassa efter patientens behov. Materialet blir mjukt och formbart vid värmeaktivering i vattenbad inställt på 65 °C.

1. Mät patienten. Om ortosen är för stor kan du markera var den ska justeras, mjuka upp materialet i värmebadet och klippa till rätt storlek.
2. Applicera stockinette och polstring på patienten.
3. Placera Fast-Lite i vattenbadet i 20–30 sekunder så att materialet mjuknar. Det är viktigt att börja med ortosens led för att säkerställa en god passform vid häl eller armbåge.
4. Forma ortosen runt patienten och säkerställ att leden passar ordentligt.
5. Arbetstiden är 3–4 minuter, och materialet är fullt härdat efter 20 minuter.



Artikelnummer	Storlek	Skena	Vänster/Höger
64961	S - XL	Underbensskena	Universal
64962	S - XL	Armbågsskena	Hö/Vä

*Snabb och smidig
förformad lösning*



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no