

CAMP®

X-LITE® PLUS


GIPSMATERIAL för alla APPLIKATIONER

Säg **adjö till handskar**, munskydd och speciella utsug. Välj ett alternativ **fritt från isocyanater** och **glasfiber**. Skydda vår natur och **undvik** arbetsrelaterade **hälsorisker!**



X-LITE® PLUS RULLAR & DISPENSER

Vårt senaste material för cirkulärgips och skenor.
Rullarna är tillgängliga i 5 färger, i 6 olika bredder. Material för skenor i dispenser finns i Hot Pink, Blå och Svart i 15 cm bredd.

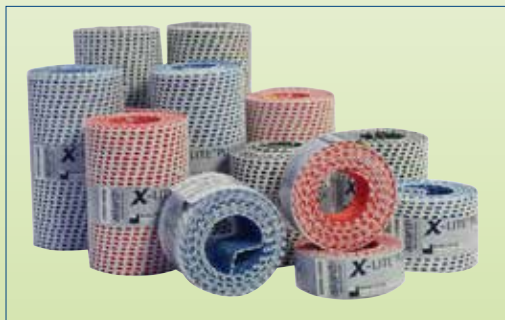

Art.nr	Färg	Width	Längd	Förp.
64701 0000	Vit	25 mm	1,8 m	5 rullar
64702 0000	Vit	50 mm	1,8 m	20 rullar
64703 0000	Vit	75 mm	1,8 m	20 rullar
64704 0000	Vit	100 mm	1,8 m	10 rullar
64706 0000	Vit	125 mm	1,8 m	10 rullar
64707 0000	Vit	150 mm	1,8 m	10 rullar
64711 0000	Röd	25 mm	1,8 m	5 rullar
64712 0000	Röd	50 mm	1,8 m	20 rullar
64713 0000	Röd	75 mm	1,8 m	20 rullar
64714 0000	Röd	100 mm	1,8 m	10 rullar
64716 0000	Röd	125 mm	1,8 m	10 rullar
64717 0000	Röd	150 mm	1,8 m	10 rullar
64721 0000	Blå	25 mm	1,8 m	5 rullar
64722 0000	Blå	50 mm	1,8 m	20 rullar
64723 0000	Blå	75 mm	1,8 m	20 rullar
64724 0000	Blå	100 mm	1,8 m	10 rullar
64726 0000	Blå	125 mm	1,8 m	10 rullar
64727 0000	Blå	150 mm	1,8 m	10 rullar
64731 0000	Svart	25 mm	1,8 m	5 rullar
64732 0000	Svart	50 mm	1,8 m	20 rullar
64733 0000	Svart	75 mm	1,8 m	20 rullar
64734 0000	Svart	100 mm	1,8 m	10 rullar
64736 0000	Svart	125 mm	1,8 m	10 rullar
64737 0000	Svart	150 mm	1,8 m	10 rullar
64741 0000	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5 rullar
64742 0000	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20 rullar
64743 0000	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20 rullar
64744 0000	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10 rullar
64746 0000	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10 rullar
64747 0000	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10 rullar
64750 0000	Blandade färger	150 mm	1,8 m	5 rullar
64791 0000	Blå	150 mm	10 m	1 dispenser
64792 0000	Svart	150 mm	10 m	1 dispenser
64793 0000	Hot Pink	150 mm	10 m	1 dispenser

X-LITE® PLUS passar till alla cirkulärgips och skenor. Materialet består av ett nät i 100 % bomull som är impregnerat med en icke-toxisk termoplast. Det ger dig ett icke-toxiskt och miljövänligt material som är helt ofarligt för personalen som arbetar med det och patienten som blir gipsad. **EcoCast!**

- X-LITE® PLUS kan enkelt formas på patienten utan handskar
- X-LITE® PLUS är ultra-lätt och ger ett luftigt gips som andas
- X-LITE® PLUS har en mjuk textil yta som ytterligare bidrar till ökad patientkomfort



- X-LITE® PLUS ger ett stabilt och motståndskraftigt gips, med endast 50 % överlappning
- X-LITE® PLUS kan obegränsat återanvändas och återuppvärmas.
- X-LITE® PLUS finns i 5 färger - Svart, Vit, Röd, Blå och Hot Pink



X-LITE® skall värmas i ett vattenbad inställt på 70°C i 1-3 minuter. Materialet är fullt härdat på 20 minuter.

X-LITE® PLUS kan också med fördel användas för tillverkning av avtagbara skenor och terapeuten kan enkelt justera skenans stabilitet genom att lägga extra lager eller individuella förstärkningar av materialet. Kardborre, polstring och andra förstärkningar fäster lätt och permanent på X-LITE®.

X-LITE® PLUS kan värmas upp och omformas upprepade gånger på samma patient. Gör små ändringar genom att punktvärma ett färdigt gips i stället för att gipsa ett nytt, som kommer att kosta mer, ta mer tid och kanske orsaka obehag för din patient.

X-LITE® PLUS finns att få i rullar i 6 olika bredder och i en praktisk 15 cm dispenser box.

X-LITE® STOCKINETTE I EN PRAKTISK DISPENSER BOX!

Vi erbjuder nu en rundstickad Stockinette i en mjuk och hållbar kvalitet. Stockinetten är tillverkad av polyester som formar sig runt extremiteten utan att lämna rynkor mot huden. Tillgänglig i dispenser box med 25 m.



Art.nr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64394 0000	Vit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395 0000	Vit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396 0000	Vit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397 0000	Vit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398 0000	Vit	150 mm	25 m	1 dispenser



Lär dig mer om hur du arbetar med vårt EcoCast material. Instruktioner och videos hittar du på www.camp.se