



Ryggortoser

www.camp.se

Camps Korsettsortiment

Camp Scandinavia har sedan 1908 designat, producerat och marknadsfört korsetter för olika behov. Lika länge har vi lyssnat på patienter och utprovare för att tillhandahålla de produkter som fyller deras behov. Vi kan med rätta säga att vi har god erfarenhet inom korsett-försörjning och är stolta över att idag kunna presentera vårt breda sortiment på de följande sidorna.


Vid val av korsett är det viktigt att överväga indikation och anatomi men också att ta hänsyn till patientens figurtyp, livsstil och acceptansnivå. För att underlätta valet har vi delat in våra gördlar och korsetter i katalogen efter nedanstående system. Önskar du ytterligare information är du välkommen att ringa vår Kundsupport.

Stabilitet

Gördlar	Elastiskt material
Korsetter	Tyg, förstärkt med skenor
Rigida	Plast, metall

Höjd

SIO	Sacro-iliacal
LSO	Lumbo-sacral
TO	Thoracal
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal

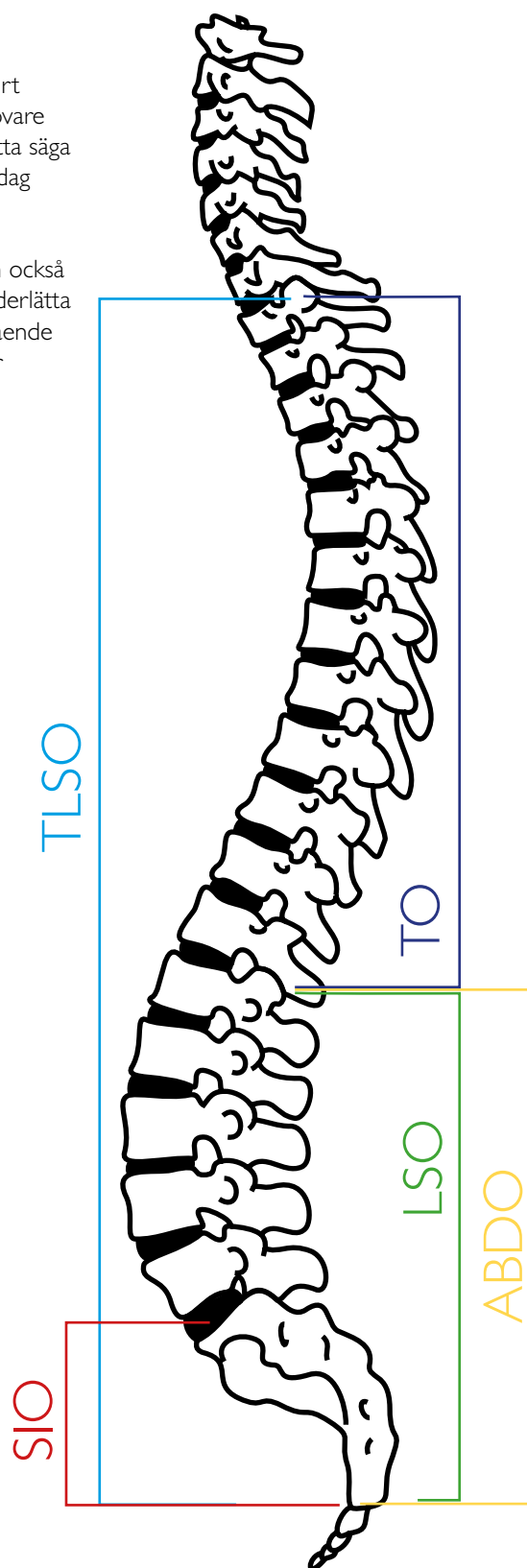

Trokanterbälte Tro-Camp

SIO - Stabilt bälte för sacro-iliacaleden som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel knäppslå tillåter storleksutvidgning under graviditet. Snörningen mitt bak dras samman för att minska belastningen på sacro-iliacaleden. Grenband medföljer. Bältet försluts med hakar och hyskor mitt fram.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfysiolysbesvär.

Övrigt: Storlek = Höftmått

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd bak	Höjd fram
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobälte

SIO - Bälte för sacro-iliacaleden med en elastisk inre del mot huden och en yttre rigid del för avlastning och stabilisering. Bältet passar både rak och midjesvängd figurtyp. Försett med antiglidstopp som förhindrar bältet att glida mot hud eller kläder. Avtagbar pelott.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfysiolysbesvär.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
21030	Svart	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm





Graviditetsbälte MAMMY

Anatomiskt graviditetsbälte som kan anpassas till de olika stadierna under graviditeten. Bältet lyfter upp magen för att minska känslan av tyngd i bäckenområdet. Skenor i ryggen stödjer och förbättrar hållning, vilket minskar ryggsmärta. I sidorna finns extra dragband för att justera stödet vid behov. Tillverkad i ett modernt och extra mjukt material för komfort och låg vikt.

Användningsområden: Graviditetsrelaterad ryggsmärta och/eller bäckensmärta.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22149	Grå	En storlek	90-130cm	13 cm	7 cm
22150	Beige	En storlek	90-130 cm	13 cm	7 cm



Elcross® LUX låg

SIO - Denna låga modell är avsedd att ge ett sacroiliacalt stöd men kan också placeras för ett mer lumbosacralt stöd. Elcross®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm

SELECTION® rygg låg

SIO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35400	Svart	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® rygg regular

LSO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35401	Svart	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® rygg wide

ABDO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® -materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd. Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35402	Svart	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm



NAVY X™



Navy-X finns i 3 olika höjder - låg, mellan och hög.

Mellan-modellen finns dessutom i 3 olika färger - marinblå, beige och grå.

Gemensamt för alla modellerna är:

- det slitstarka och luftiga materialet
- de extra stabiliserande dragbanden
- den förlåtande passformen



Den höga modellen har delad förslutning framtill och öppna kanaler i ryggen för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Samtliga modeller finns i storlekarna X-Small upp till XX-Large, vilket täcker in ett höftmått från 75 cm upp till 135 cm.



Höjder i cm:

		Fram	Bak
23549	Blå	12	18,5
23554	Grå	12	18,5
23550	Blå	16	22
23555	Grå	16	22
23560	Beige	16	22
23552	Blå	25	31

Navy X™ låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacalt stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23549	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm





Navy X™

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23550	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy X™ hög

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material. Modellen är extra hög och har delad förslutning framtill samt extra dragband för ökad stabilisering. Den har öppna kanaler bak för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Användningsområden: Ryggsmerta och rygginsufficiens

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23552	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Aluminiumskenor 2 st	2 cm x 26 cm			





Elcross® LUX mellan

LSO - En mellanhög modell som ger ett stabilt lumbosacralt stöd. Elcross® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm

Elcross® Light mellan

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross®-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22159	Svart	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm



Elcross® LUX hög

LSO - Denna något högre modell lämpar sig väl för den lite längre personen och ger stöd lumbosacralt men även i nedre delen av bröstryggen. Elcross® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm

Elcross® Light hög

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross®-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22160	Svart	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm



Camp MAX korsett mellan

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22140	Grå	Small	80-95 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Medium	90-105 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Large	100-115 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	X-Large	110-125 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	XX-Large	120-135 cm	28 cm	20 cm





Camp MAX korsett hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22141	Grå	Small	80-95 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Medium	90-105 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Large	100-115 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	X-Large	110-125 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	XX-Large	120-135 cm	33 cm	20 cm



Camp MAX korsett extra hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22142	Grå	Small	80-95 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Medium	90-105 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Large	100-115 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	X-Large	110-125 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	XX-Large	120-135 cm	35 cm	23 cm

SpinAir Ryggortos

SpinAir är avsedd för patienter med osteoporos och patienter med kyfos. Ortosen erbjuder en effektiv och behaglig behandling vid dessa tillstånd. Ortosen främjar och förbättrar tillbakaskjutning av axlarna utan revbenssupport, för ökad bekvämlighet. Lumbala förstärkningar ger ökad stabilitet och en bättre lumbal passform. SpinAir är diskret med låg vikt och lätt att prova ut på patienten. Flexibla axelband ger en anatomisk passform av ortosen över axlarna. En mjuk vaddering ger ytterligare komfort för patienten. Axelbanden kan justeras efter behov och gradvis förbättring. De kan även klippas till önskad längd.

Användningsområden: Osteoporos, kyfos, spinal artros

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd bak
22146	SpinAir	Small I	78-93 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium I	90-105 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium2	90-105 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large2	103-120 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large3	103-120 cm	68-75 cm
22147	SpinAir Förlängningsband	En storlek		



Mått: Måttet "Höjd bak" mäts från Th2 till SI.

Elcross® LUX skuldra

TO - Elastiskt mjukt hållningsbandage tillverkat av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. med bomull mot huden för patienter som behöver stöd över bröstryggen vid t.ex. hållningsträning. Polstrade axelband gör att bandaget inte skaver. Kardborrlåsning mitt fram. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Rygginsufficiens, kyfos och hållningsproblem.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mått: Runt bröstkorgen under bysten.



Elcross® LUX mage

ABDO - Den här modellen är speciellt framtagen för patienter med kraftigt magparti. Den ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter och stödjer buken. Framstycket har en bred kardborreöppning på en sida som gör det möjligt att variera bredden och få ett optimalt lyft och stöd. Kan även med fördel användas av gravida allt eftersom magen växer. Banden kan placeras fram eller under magen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens. Som stöd vid slapp bukmuskulatur, vid mindre bräck.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm



Ryggplatta

Hjärtformad ryggplatta i Campolite, klädd med frotté. Plattan fästs med kardborrband på korsetten eller gördeln. Utskuren för ryggraden i syfte att undvika tryck.


Art. nr.	Storlek	Bredd	Tjocklek	Höjd
22135	En storlek	18 cm	1 cm	16 cm

Camp® ONE Låg

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna låga modell ger stöd för lägre delen av ländryggen och över sacrum. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22178	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	X-Large	110 - 120 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm

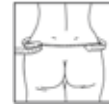



Camp® ONE Mellan

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna mellan höga modell ger ett stadigt stöd för ländryggen. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22179	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm

Camp® ONE hög

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna något högre modell ger ett stabilt stöd för ländryggen och nedre delen av brösttryggen. Lämpar sig väl även för personer med längre rygg. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22180	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Camp® ONE tillbehör

För komplettering med extra skenficka, när extra stabilitet önskas, finns det två bredder av skenficka samt tillhörande kantband att beställa.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd
22183	Kantband grå		125 m
22184	Material till skenficka grå	25 mm	30 m
22184	Material till skenficka grå	34 mm	30 m





Camp® XXI mellan

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm



Camp® XXI hög

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm

Camp® XXITLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Polstrade axelband på skulderdelen gör att ortosen inte skaver. Axelbanden kryssas bak på bröstryggen och fästs på framsidan. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Osteoporos och kyfos.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm

Camp® XXI mage

ABDO - Lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Denna modell är speciellt lämplig för patienter med kraftigt magparti. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då snörningen är mycket enkel att reglera. Tvådelad kardborrlåsning i sidan ger god justeringsmöjlighet och underlättar vid påtagning.

Användningsområden: Ryggsmärta eller rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm



Lumbo 267

LSO - Tygkorsett i bomull som passar en medelstor, rak figurtyp. Korsetten har tredubbel Camp-snorring i vardera sida och resårinfällningar upp- och nertill i sidan fram. Försedd med öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med dragkedja mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har 4 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22672	74	74 cm	39 cm	26 cm
22672	78	78 cm	39 cm	26 cm
22672	82	82 cm	39 cm	26 cm
22672	86	86 cm	39 cm	26 cm
22672	90	90 cm	39 cm	26 cm
22672	94	94 cm	39 cm	26 cm
22672	98	98 cm	39 cm	26 cm
22672	102	102 cm	39 cm	26 cm
22672	106	106 cm	39 cm	26 cm
22672	110	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 439

LSO - Tygkorsett i bomull som passar både rak och midjesvängd figurtyp.

Korsetten har genomgående resårinfällningar i vardera sida fram och öppna fjäderremсор bak. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då den försluts med kardborrband genom vändsölja växelvis från höger/vänster.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Midjemått	Höjd bak	Höjd fram
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm

Lumbo 591

LSO - Tygkorsett som passar för en rak figurtyp. Korsetten har resårinfällningar i vardera sida nertill fram och öppna fjäderremсор i ryggen. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Försluts med reglerbara dragband växelvis från höger/vänster.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta halvfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
27591	82	82 cm	42 cm	30 cm
27591	86	86 cm	42 cm	30 cm
27591	90	90 cm	42 cm	30 cm
27591	94	94 cm	42 cm	30 cm
27591	98	98 cm	42 cm	30 cm
27591	102	102 cm	42 cm	30 cm
27591	106	106 cm	42 cm	30 cm



Lumbo 073

LSO KorsettTygkorsett som passar för en midjesvängd figurtyp. Korsetten är försedd med dubbel Camp-snorring i vardera sidan, resårinfällningar upp- och nertill i sida fram samt öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med hakar och hyskor i främre sidsömmen.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har 2 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej. Storlek = Höftmått

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd bak	Höjd fram
29073	Beige	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	110 cm	30 cm	20,5 cm



Kantband elastiskt

Ett elastiskt kantband för kantning av textila korsetter.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25010	Vit	20 mm	175 m	Rulle
25010	Beige	20 mm	175 m	Rulle





Dragband

Stadigt dragband i nylonjord. Materialet är stabilt och ytan tillåter en vandsölja att glida utan motstånd. Den avklippta kanten försluts genom bränning.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd
29715	Vit	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Trevikt list

Trevikt list i bomull för färdigställande av korsett. Används som skenficka.

Art. nr.	Färg	Bredd	Förp.
25006	Beige	21 mm	50 mm



Navy™ Xtra

Navy™ Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med rygggortoser under varumärket NavyX™.

Användningsområden: Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbräck, Buktande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

Kontraindikationer: Instabil ryggrad.

Övrigt: Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm

Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer; osteoartrit.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.



Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Extra bröstplatta	En storlek		
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			



Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Extra bröstplatta			
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			



Höjd: Mät från bröstben till pubis.

C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbyttbar.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Extra polstring	Small		
20359	Extra polstring	Medium		
20359	Extra polstring	Large		
20359	Extra polstring	X-Large		
20360	Extra band med spännen	En storlek		

Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64919	Fram	XS / S	5 mm	19,5 cm	60 - 75 cm
64919	Fram	S / M	5 mm	19,5 cm	70 - 90 cm
64919	Fram	M / L	7 mm	21,5 cm	85 - 105 cm
64919	Fram	L / XL	7 mm	24,5 cm	95 - 120 cm
64919	Fram	XL / XXL	7 mm	27 cm	115 - 140 cm
64921	Bak	XS / S	5 mm	30 cm	60 - 75 cm
64921	Bak	S / M	5 mm	31,5 cm	70 - 90 cm
64921	Bak	M / L	7 mm	33,5 cm	85 - 105 cm
64921	Bak	L / XL	7 mm	35 cm	95 - 120 cm
64921	Bak	XL / XXL	7 mm	36,5 cm	115 - 140 cm



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.


Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64922	Fram	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Fram	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Fram	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Fram	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bak	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bak	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

MÅTTINSTRUKTIONER

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

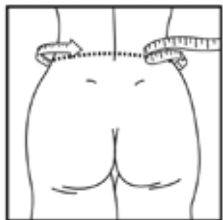

Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Beskrivning	Omkrets i cm		Total höjd fram i cm	Total höjd bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO fram



LSO bak





TLSO fram



TLSO bak

Dessa illustrationer visar den ungefärliga höjden för de två modellerna, LSO och TLSO.

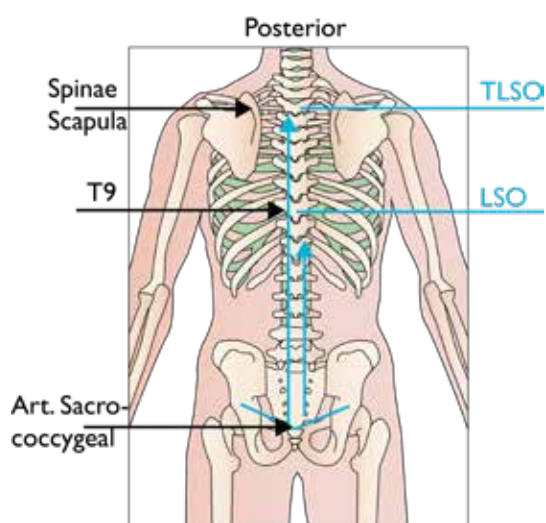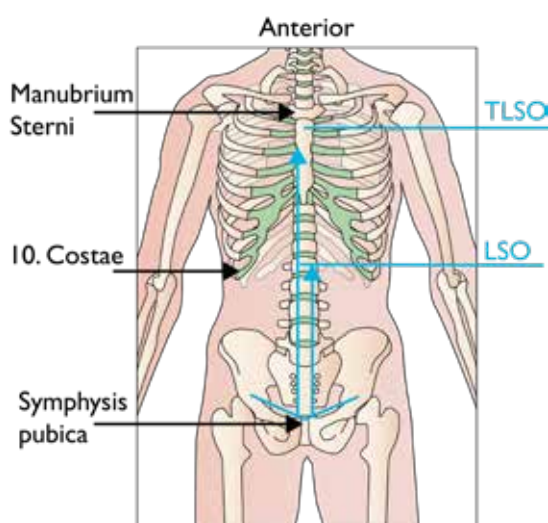

BOSTON Overlap Brace

Prefabricerad korsett speciellt framtagen för behandling av kronisk eller tillfällig ländryggssmärta. Korsetten finns i 20 standardstorlekar och i flera olika tjocklekar och olika lordosgrader. Kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Välj mellan polstrad och opolstrad. Modulen är tillverkad av polyeten. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Ländryggssmärta, spondylolistes, spondylt, osteoporos, pre- och postoperativt, spinal stenos och frakturer.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit polyeten. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.



Art. nr.	Modell	Tjocklek
29690	Standardmodul 15°	1,5 mm
29694	Standardmodul 30°	3 mm
29695	Standardmodul 15°	3 mm
29697	Måttbeställd polstrad	3 mm
29698	Standardmodul polstrad 15°	3 mm
29696	Ryggfjädrar 20 cm	
29696-1	Ryggfjädrar 25,5 cm	
29696-2	Ryggfjädrar 30,5 cm	
29696-3	Ryggfjädrar 35,5 cm	



BOSTON LITE™

Boston LITE™ är en vidareutveckling av "Soft Brace", som funnits på marknaden under många år. Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet. Boston LITE har fått en del nya funktioner. Genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten är det möjligt att göra hål i den mjukare plasten som finns mellan de olika förstärkningssegmenten. Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"-väv. Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne. För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats med en låg-profil och ett smidigare utseende.

Användningsområden: Neuromuskulära Skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i samma färger som Boston Soft Body Jacket. Kontakta Kundsupport för färgprover. Boston LITE finns enbart med öppning bak. Storlekarna för Boston LITE Liner täcker in 2 storlekar av modulen (J1 / J2 = storlek 1, J3 / J4 = storlek 2) Boston LITE Måttbeställd (29726 och 29728) kan enbart fås i samma storleksomfång som standardstorlekarna J1 – Y4F, med 15 graders lordos och öppning bak. Till varje korsett ingår 1 st liner. Ytterligare liners kan beställas separat. En speciell bandlösning med spännen ingår.

Art. nr.	Modell	Beskrivning	Storlek	Lordosgrad
29725	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	Måttbeställd	15°
29728	Boston LITE Korsett	Färdigställd	Måttbeställd	15°
29729	Boston LITE Korsett	Färdigställd	J1 - Y4F	15°
29730	Separat liner	(se under Mått)	1 - 6	
29731	Extra band	Set av 3 band/spännen	En storlek	
29732	Plastspänne			

BOSTON Soft Body Jacket

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan samt mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen, finns i 30 storlekar, är vit, har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler. Kan beställas i olika färger, lordoser, öppna eller slutna kanaler samt efter mått. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Neuromuskulära scolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i flera olika färger som framgår av Beställningsformuläret. Kontakta Kundsupport för färgprover. Den kan även beställas med en extern ram som har heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av BSBJ med extern ram är grundmaterialet alltid vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ	Lordosgrad
29707	Standardmodul	Öppna kanaler	15°
29708	Måttbeställd	Öppna kanaler	
29709	Standardmodul	Slutna kanaler	15°
29710	Måttbeställd	Slutna kanaler	
29700	Med ram		
29719	Band med spänne	5 cm x 30,5 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket tillverkad av LDPE (low density polyeten) är avsedd för immobilisering av ryggraden. Kan beställas efter mått eller gipsavgjutning. Skall användas tillsammans med linne. Band ingår ej.

Användningsområden: Postoperativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polyeten (LDPE). Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär.

Art. nr.	Modell
29701	Måttbeställd
29699	Tillägg Färdigställd korsett





BOSTON Skolioskorsett

Väldokumenterad prefabricerad korsett för scoliosbehandling. Finns i 30 standardstorlekar i 0° eller 15° lordos, men kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Modulen är tillverkad av polypropen som polstrats med polyetenfoam. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår ej.

Användningsområden: Idiopatiska skolioser.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polypropen. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Tjocklek
29705	Standardmodul 15°	4,5 mm
29706	Standardmodul 0°	4,5 mm
29704	Måttbeställd	4 mm



BOSTON Skoliosis Night Brace

Skolioskorsett avsedd att användas på natten. Korsetten ska användas minst 7 timmar/natt. Modulen är tillverkad av 3 mm copolymer och finns i två olika utföranden. En med avtagbar polstring och en med permanent polstring. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår.

Användningsområden: Denna produkt är avsedd för behandling av idiopatisk skolios enligt följande riktlinjer; Mindre kurvstorlek: Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skelett omogna (Riser 0-3); Apex upp till maximalt Th9; Dubbla kurvaturer kan behandlas men kräver högre kompetensnivå. Det viktiga elementet i behandlingen av dubbla kurvaturer är förmågan att identifiera de primära och sekundära krökarna. Vid behandling av en dubbel-kurvatur bör den primära vara den Thorakala. Om det är den Lumbala kröken som är den primära kontakta oss för vidare rådgivning.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Copolymer. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av heltäckande mönster är alltid innermaterialet vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd Beställningsformuläret vid måttbeställningen. Tillverkningsmanual finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ
29720	Färdigställd - med avtagbar polstring	Måttbeställd
29721	Ej färdigställd - med avtagbar polstring	Måttbeställd
29722	Färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd
29723	Ej färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd

BOSTON korsett tillbehör

Här finner du olika tillbehör för färdigställande av Boston Skoliosmoduler. Det är förstärkningsset främre och bakre, svetstråd och pelotter.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Vå/Hö
29711	Förstärkningsset Anterior	En storlek			
29711	Förstärkningsset Posterior	En storlek			
29713	Svetstråd plast		3 mm	1,2 m	
29713	Svetstråd plast		5 mm	1,2 m	
29715	Dragband vit		25 mm	50 m	
29715	Dragband beige		25 mm	50 m	
29750	Elastiskt material, vit		20 cm	1 m	
29753	Lumbar pad	Small			Vå/Hö
29753	Lumbar pad	Large			Vå/Hö
29753	Lumbar pad	Small			
29753	Lumbar pad	Large			
29757	Abdominal pad	Medium			
29757	Abdominal pad	Large			



Standard Boston T Linne

Boston T linne är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Det vita linnet har rund hals och monolateral vinge i axillaområdet för att skydda mot ryggortosens övre kant. Det elastiska materialet säkerställer en skrynkelfri och tight passform under korsetten.

Den är tillverkad av 95,6 % CoolMax® och 4,4 % Lycra®. CoolMax® ger effektiv fukthantering som förflyttar svetten bort från kroppen och genom tyget där det snabbt avdunstar, vilket gör att användaren känner sig svalare och bekvämare.

Övrigt: Enkel vinge 2-ply



Art.nr.	Färg	Storlek	Bredd	Längd	Omkrets	Axillastöd
29766	Vit	S	152 mm	483 mm	40-61 cm	Två sidor
29766	Vit	M	203 mm	533 mm	61-81 cm	Två sidor
29766	Vit	L	254 mm	711 mm	81-101 cm	Två sidor
29766	Vit	XL	305 mm	711 mm	101-122 cm	Två sidor



X-Static Boston T Linne

X-Static Boston T är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Den har samma fördelar som Standard T och levereras med bilaterala vingar i axillaområdena. X-Static®-fibrer hjälper till att transportera bort fukt från huden och förhindra lukt. Linnet har även svalkande och antistatiska egenskaper som håller användaren sval och bekväm.

Vingarna i axillaområdena består av 95,6 % polyester/X-Static®-blandning och 4,4 % Lycra®.

Övrigt: Dubbel vinge 2-ply

Art. nr.	Storlek	Färg	Längd	Bredd	Omkrets
29716	Small	Grå	483 mm	152 mm	40 - 61 cm
29716	Medium	Grå	533 mm	203 mm	61 - 81 cm
29716	Large	Grå	711 mm	254 mm	81 - 101 cm
29716	X-Large	Grå	711 mm	305 mm	101 - 122 cm



Boston Brace Mönster och Transfers

För olika Boston korsetter finns det mönster och transfers att välja. Dessa kan enbart väljas för måttbeställda korsetter. Inte för standardmoduler som lagerhålls. Dessa gäller för Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Scolioskorsett och Boston Night Brace.

Art. nr.	Modell
29716	Transfer lösa
29717	Transfer monterade på korsett
29718	Helt mönster monterat på korsett

Storleksschema för Bostonkorsetter

Storlekstabell B.O.B

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
I	71	51	66
ID	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Storlekstabell Flexaform

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Storlekstabell Scolios och Soft Body Jacket

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Storleksschema Boston LITE

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
I5J1	54	40	49
I5J2	58	42	51
I5J3	62	45	54
I5J4	64	47	56
I5Y1	67	46	56
I5Y1A	66	51	55
I5Y2	71	47	60
I5Y2A	72	55	62
I5Y3	75	48	63
I5Y3A	78	57	69
I5Y4	79	51	64
I5Y4F	80	57	66

Egna anteckningar

[illegible]