



En funktionell Ortoskombination



Semi-rigid Hyperextensionsortos



En Allard AFO

Kombinera med alla
modeller av:

- Ypsilon®
- ToeOFF®
- BlueROCKER®



En funktionell knäortos vid hyperextension i knäleden

- Effektiv hyperextensionskontroll med eller utan AFO!
- Knäortos vid hyperextension framtagen för att användas tillsammans med en Allard AFO!



Strategiskt placerad silikon för att hindra migration.

Anatomiskt formad patellaöppning med silikonpolstring.

Justerbara ledstopp.
Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
Extension: 10°, 20°, 30°, 40°

Ficka som skyddar och håller leden på plats.

Ortosen är förformad efter benets kontur för bättre komfort.



Kryssbandet kan enkelt justeras med en hand.

Det breda bandet hindrar skenorna från att åka bakåt när hyperextensionsbandet dras åt.

Förformad förstärkning som stabiliserar öppningen och avlastar tryck från AFO.

Vad är det som gör CROSS™ användarvänlig?



Tunnt, lätt material som andas och är bekvämt för användaren

- Den unika konstruktionen gör att ortosen alltid håller sig öppen i ovankanten och gör det enkelt att föra ortosen över foten och upp på benet.
- Generös pådragningsficka i ovankanten används för att dra ortosen upp på benet och justera så att patellaöppningen är korrekt placerad över knäet.



Ultramjuk insida med låg friktion och utan synliga sömmar som skaver

- Skapar ett "skyddslager" mellan ortosen och huden
- Motverkar hudirritation
- Hjälper ortosen att glida lätt över foten och upp på benet.



Ta på ortosen med en hand

Det unika "ta-på-hornet", som är inkluderat, gör det enklare att:

- På egen hand ta på ortosen i sittande.
- På egen hand ta på ortosen även vid nedsatt handfunktion.

Hur skall Ta-På-Hornet användas?

- Ta-på hornet monteras under den grå markeringen på lårdelens baksida.
- Med alla band öppnade dras ortosen med baksidan framåt, upp över foten.
- När ortosen dragits över foten vrids ortosen rätt. Detta moment underlättas genom det ultramjuka materialet på insidan av ortosen. Ortosen dras upp på benet tills dess att patellaöppningen är korrekt placerad över knäet.

CROSS™

Hyperextensionsortos



CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan med fördel användas tillsammans med en Allard AFO när hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.



[www.youtube.com
Camp Scandinavia](http://www.youtube.com/CampScandinavia)


Patent pending

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Omkrets 15cm under mid-patella	Omkrets mid-patella	Omkrets 15cm ovan mid-patella
28715 0011	CROSS™ Knäortos	Small	32-37cm	32-37cm	39-44cm
28715 0012	CROSS™ Knäortos	Medium	36-41cm	36-41cm	43-48cm
28715 0013	CROSS™ Knäortos	Large	40-45cm	40-45cm	47-52cm
28715 0014	CROSS™ Knäortos	X-Large	44-49cm	44-49cm	51-57cm
28716 0000	Ta-på-horn	En storlek			

För att möta olika brukares behov vid hyperextension i knäleden - prova andra lösningar.

C.H.E.C.K.™ Stainless Steel

När längre hävarm
behövs för att kontrollera
översträckningen.

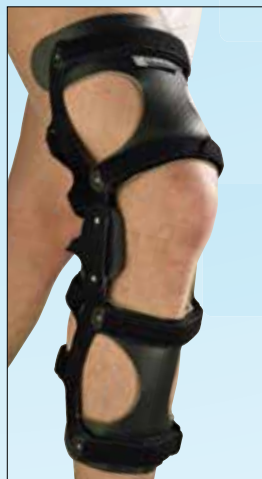

COMBO™ Hyperextension KAFO

I de fall skadan kräver en
KAFO för att kontrollera
översträckningen.

