

SureStep Indy 2 Stage

En ortos med unik design, utvecklad så att barn kan uppnå sin rörelseförmåga från flera olika nivåer. Ortosen finns i två utföranden; Solid, som är utan led, och Ledad. Denna unika tvåstegs-ortos (en ortos inuti en annan ortos) gör det möjligt att använda Surestep oberoende av AFOn. Den tillåter barnet att förflytta sig på flera olika sätt utan att hämma den normala muskelfunktionen. När de båda ortoserna används samtidigt, låser sig SMO:n säkert inuti AFOn och omvandlar därmed den dynamiska SMO:n till en AFO som ger stabilitet i tre plan utan att begränsa den normala användningen av fotens inre muskulatur.

Indy 2 Stage är idealisk för barn som behöver proximalt stöd av en AFO, för att uppnå ett oberoende stående, men som fortfarande har glädje av en SMO för att kunna krypa och ta sig upp till stående aktiviteter på rätt sätt. Under tiden som dessa barn utvecklas och börjar ta självständiga steg med sin AFO kan du fortsätta att arbeta med att förbättra rörelsemönster och muskelstyrka med SMO:n för att uppnå en smidigare övergång till en minskad användning av ortoser. Barn med funktionshinder som leder till att de blir tröttare under dagen, kan börja att använda SMO på morgonen för att bibehålla sina funktionella muskelgrupper. Senare under dagen kan AFO-delen läggas till för att bibehålla ett stabilt och funktionellt gångmönster.

Användningsområde

Hyperton fot och ankel. Hypoton fot och ankel. Barn som behöver hjälp att förflytta sig. Svårighet att uppnå ett stabilt stående. Sagital och frontal instabilitet/svaghet. Låg proprioceptiv medvetenhet.

Kontraindikation

Fotledskontrakturer som begränsar passiv dorsalflektion >90 grader. Svår spasticitet.



Art.nr.	Modell	Förp.	Storlek
286311000	Solid, Gips & Mått	Par	-
286310000	Solid, Gips & Mått	Styck	-
282600011	Ledad, Gips & Mått	Styck	<18 kg
282600013	Ledad, Gips & Mått	Styck	18-40 KG