

# OACTIVE<sup>®</sup> 2

Unilateral knäortos för behandling av enkelsidig knäartros. Smidig och enkel konstruktion med låg vikt. Tillverkad av aluminium. Ortosen har smarta innovativa spännen för att underlätta att ta på och av ortosen.

Den unika Q-leden justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. OACTIVE<sup>®</sup> 2 kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. OACTIVE<sup>®</sup> 2 finns i en storlek, vänster eller höger.



## Användningsområde

Mild till svår enkelsidig knäartros. Medialt eller lateralt.

## Kontraindikation

Se bruksanvisningen.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
550001000	OACTIVE 2	One Size	Vänster
550002000	OACTIVE 2	One Size	Höger
550121000	Extra bandset (utan spännen)	One Size	Vänster
550122000	Extra bandset (utan spännen)	One Size	Höger
550131000	Extra polstring	One Size	Vänster
550132000	Extra polstring	One Size	Höger
550140061	Suspension Wrap	61 cm	-
550140081	Suspension Wrap	81 cm	-