

S.O.T tumortos

S.O.T tumortos är en anatomiskt formad vilootos för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootoser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks.

När extra stöd för handleden behövs kan S.O.T Tumortos användas tillsammans med en handledsortos. Vission 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med S.O.T Tumortos.

Användningsområde

SOT Tumortos är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

Mått

Mått 1: 2-5 MCP

Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2
287201011	SOT Tumortos	Vänster	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287201012	SOT Tumortos	Vänster	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287201013	SOT Tumortos	Vänster	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287202011	SOT Tumortos	Höger	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287202012	SOT Tumortos	Höger	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287202013	SOT Tumortos	Höger	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287211011	Extra överdrag	Vänster	Small	-	-
287211012	Extra överdrag	Vänster	Medium	-	-
287211013	Extra överdrag	Vänster	Large	-	-
287212011	Extra överdrag	Höger	Small	-	-
287212012	Extra överdrag	Höger	Medium	-	-
287212013	Extra överdrag	Höger	Large	-	-
287260000	SOT extra tyg	-	35 x 35 cm	-	-