

SWASH[®] Steady

Swash är ett unikt dynamiskt höftstöd som möjliggör kontrollerad variabel abduktion och dynamisk rörelse i alla tre rörelseplan. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gående, vilket är vanligt vid cerebral pares. Men den kanske viktigaste fördelen med SWASH är vägledning för höftinriktning.

SWASH Steady ger maximal bålkontroll, valet när patienten huvudsakligen är icke-ambulatorisk (GMFCS IV-V), har låg båltonus och/eller mycket begränsad bålkontrollstyrka eller när större bäckentäckning ger mer önskvärd neuro-sensorisk motorisk respons. Vid sittande är basen breddad för stöd, vilket hjälper barnet att få en upprätt balanserad hållning och samtidigt stretcha adduktormusklerna.

En komplett SWASH-ortos kräver en bäckensektion, lårdel och benstag. Beställ varje artikel separat.

SWASH Steady har en bäckensektion i polyeten som sträcker sig från L2/L3 till distala kanten av sakrum, vilket ger maximalt stöd för bål och bäcken.

Benstag finns i 2 olika versioner:

115° = smal sittbas / 123° = bred sittbas.

Benstagen är 6 mm i diameter för storlek I. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter.

Användningsområde

Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft subluxation. När maximal bålkontroll är nödvändig, t.ex. patienter som saknar muskelstyrka eller tillräckligt med bålkontroll för att kunna sitta upprätt. När patienten primärt är orörlig.

Kontraindikation

Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktörerna är för starka för ortosen. När adduktörerna är för korta för att använda SWASH[®] vid sittande.

Mått

För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH[®] Fitting Manual.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Längd	Diameter
288520001	STEADY Midjedel	1, passsar stag Ø 6 mm)	40-46,5 cm	-	-
288520002	STEADY Midjedel	2	46-55 cm	-	-
288520003	STEADY Midjedel	3	54-63 cm	-	-
288520004	STEADY Midjedel	4	62-72 cm	-	-
288540601	STEADY Lårdel	1	21-25 cm	-	-
288540802	STEADY Lårdel	2	25-29 cm	-	-
288540803	STEADY Lårdel	3	29-33 cm	-	-
288540804	STEADY Lårdel	4	33-38 cm	-	-
288540805	STEADY Lårdel	5	38-44 cm	-	-
288540806	STEADY Lårdel	6	44-50 cm	-	-
288550601	STEADY Benstag set 115°	1	-	31 cm	6 mm
288550802	STEADY Benstag set 115°	2	-	37,5 cm	8 mm
288550803	STEADY Benstag set 115°	3	-	44 cm	8 mm
288550804	STEADY Benstag set 115°	4	-	48 cm	8 mm
288550805	STEADY Benstag set 115°	5	-	54 cm	8 mm
288550806	STEADY Benstag set 115°	6	-	60 cm	8 mm
288560601	STEADY Benstag set 123°	1	-	31 cm	6 mm
288560802	STEADY Benstag set 123°	2	-	37,5 cm	8 mm
288560803	STEADY Benstag set 123°	3	-	44 cm	8 mm
288560804	STEADY Benstag set 123°	4	-	48 cm	8 mm
288560805	STEADY Benstag set 123°	5	-	54 cm	8 mm
288560806	STEADY Benstag set 123°	6	-	60 cm	8 mm