

SWASH[®] Go

SWASH är ett unikt dynamiskt höftstöd som möjliggör kontrollerad variabel abduktion och dynamisk rörelse i alla tre rörelseplan. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gående, vilket är vanligt vid cerebral pares. Men den kanske viktigaste fördelen med SWASH är vägledningen för höftinriktning.

SWASH Go är det bästa valet för stående och gående patienter, när det primära målet är att kontrollera saxande gång och när patienten har begränsat utrymme mellan höftbenskammen och bröstkorgen. Den uppmuntrar också till större bålextension för förbättrad postural positionering.

En komplett SWASH-ortos består av 3 delar: en bäckensektion, lårdel och benstag. Beställ varje artikel separat.

SWASH Go bäckensektion har en bakre aluminiumram som sträcker sig från ungefär L2/L3 till S1/S2, med en iliac-förlängning.

Benstag finns i två versioner: 115° = smal sittbas / 123° = bred sittbas. Benstagen är 8 mm i diameter i alla sex storlekarna.

Användningsområde

Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft subluxation. SWASH[®] GO är avsedd för patienter med större ryggkontroll och som är mer aktiva.

Kontraindikation

Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktörerna är för starka för ortosen. När adduktörerna är för korta för att använda SWASH[®] vid sittande.

Mått

För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH[®] Fitting Manual.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Längd	Diameter
288530001	GO Midjedel	1	40-46,5 cm	-	-
288530002	GO Midjedel	2	46-55 cm	-	-
288530003	GO Midjedel	3	54-63 cm	-	-
288530004	GO Midjedel	4	62-72 cm	-	-
288530005	GO Midjedel	5	71-81 cm	-	-
288530006	GO Midjedel	6	80-90 cm	-	-
288540801	GO lårdel	1	21-25 cm	-	-
288540802	GO Lårdel	2	25-29 cm	-	-
288540803	GO Lårdel	3	29-33 cm	-	-
288540804	GO Lårdel	4	33-38 cm	-	-
288540805	GO Lårdel	5	38-44 cm	-	-
288540806	GO Lårdel	6	44-50 cm	-	-
288550801	GO Benstag set 115°	1	-	31 cm	8 mm
288550802	GO Benstag set 115°	2	-	37,5 cm	8 mm
288550803	GO Benstag set 115°	3	-	44 cm	8 mm
288550804	GO Benstag set 115°	4	-	48 cm	8 mm
288550805	GO Benstag set 115°	5	-	54 cm	8 mm
288550806	GO Benstag set 115°	6	-	60 cm	8 mm
288560801	GO Benstag set 123°	1	-	31 cm	8 mm
288560802	GO Benstag set 123°	2	-	37,5 cm	8 mm
288560803	GO Benstag set 123°	3	-	44 cm	8 mm
288560804	GO Benstag set 123°	4	-	48 cm	8 mm
288560805	GO Benstag set 123°	5	-	54 cm	8 mm
288560806	GO Benstag set 123°	6	-	60 cm	8 mm