

ToeUP™ textil ankel fot ortos

ToeUP är en textil droppfotsortos till användare med lindrigare form av droppfot. Ortosen har en textil ankeldel med låg profil som försluts ovan malleolerna (fotknölnarna). Ankeldelen kopplas ihop med ett elastiskt band i krokar som fästs under snörningen eller i snörningshålen på skon. Detta ger ett lyft av framfoten under gång. Lyftet regleras genom krokarnas placering eller bandets placering på ankeldelen. Det finns en tillhörande D-ring som kan hålla ihop banden. Till ToeUP finns en fotdel som kan användas vid inomhusbruk. Det är viktigt att använda ToeUP tillsammans med en strumpa.



Användningsområde

För patienter med milda droppfotssymptom som beror på neurologisk-och/eller muskulär svaghet i dorsalflexorena.

Kontraindikation

Skall inte användas av patienter som har öppna sår som är svullna, röda, med ökad temperatur eller svåra ödem och personer som är känsliga mot Latex.

Mått

Mått 1: Ankels omkrets

Mått 2: Omkrets runt foten

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2
285000010	ToeUP	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285000011	ToeUP	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285000012	ToeUP	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285000013	ToeUP	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285011011	ToeUP Fotdel	Small	Vänster	-	17-21 cm
285011012	ToeUP Fotdel	Medium	Vänster	-	21-25 cm
285011013	ToeUP Fotdel	Large	Vänster	-	25-29 cm
285012011	ToeUP Fotdel	Small	Höger	-	17-21 cm
285012012	ToeUP Fotdel	Medium	Höger	-	21-25 cm
285012013	ToeUP Fotdel	Large	Höger	-	25-29 cm
285060010	ToeUp ankeldel	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285060011	ToeUp ankeldel	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285060012	ToeUp ankeldel	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285060013	ToeUp ankeldel	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285020011	ToeUP Elastiskt snöre	X-Small - Small	-	-	-
285020013	ToeUP Elastiskt snöre	Medium - Large	-	-	-
285030000	ToeUP krokar	-	-	-	-
285040000	ToeUP D-ring	-	-	-	-
285050000	Snörhake, under	-	-	-	-