

VACO[®]cast Diabetic

OPED VACO[®]cast Diabetes imiterar den gyllene standarden för avlastning med TCC (Total Contact Cast) för diabetiska fotsår. Den är en ortopedisk fraktursko med fast böjning, utformad och konstruerad för att stödja en snabb återhämtning samtidigt som den ger optimal komfort.

Innersulan är utrustad med OPEDs patenterade vakuumteknologi, som är det moderna alternativet till gips och en integrerad del av VACO[®]-produkter. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger den skadade kroppsdel. När luften sugts ut från kudden, med hjälp av en pump, blir den hård som ett gips på bara några sekunder. Genom att öppna ventilen och låta luft strömma in i kudden blir den mjuk igen, vilket möjliggör justering till kroppsdel.

VACO[®]cast Diabetes är utrustad med extra VACO[®]cushions för ökat stöd och hållbarhet vid vikt bärande aktiviteter. Den har ett friktionsfritt velourfoder som minskar friktionen och är skonsam mot känslig hud, i en svart färg som döljer utsöndringar och fuktfläckar. Produkten är kliniskt bevisad att främja framgångsrik sårhäkning tack vare utmärkt tryckavlastning. Den möjliggör enkel inspektion av såret och förenklar behandlingen.

Ett låsbart spänne möjliggör bättre efterlevnadskontroll, och den integrerade rullande sulan säkerställer god tryckfördelning samt en säker och fysiologisk gång. VACO[®]cast Diabetes levereras med tåskydd för både hygien och extra skydd, samt en formbar skumminnersula för ytterligare avlastning. Finns i tre storlekar.

Användningsområde

Sårbildningar på foten, diabetiska fotsår, postoperativ vård efter tå- och framfotsamputationer, diabetisk neuro-osteopati (DNOAP) eller Charcot-fot. Produkten kan även användas på patienter med arteriella sjukdomar, neuropati samt infekterade eller kraftigt vätskande sår.

Mått

Skostorlek och/eller ankel-/vadamkrets samt framfotsbredd. Vid storleksgränserna mellan Small/Medium och Medium/Large-versionerna bör den större storleken av VACO[®]ped Xelgo väljas om möjligt.



| Art.nr. | Modell | Storlek | Omkrets vad | Omkrets ankel | Framfotens bredd |
|-----------|---|---------|-------------|---------------|------------------|
| 476360011 | VACOCast Diabetes | Small | 29-39 cm | 14-29 cm | 10,5 cm |
| 476360012 | VACOCast Diabetes | Medium | 35-51 cm | 35-51 cm | 12 cm |
| 476360013 | VACOCast Diabetes | Large | 40-58 cm | 30-45 cm | 13,5 cm |
| 476440011 | VACOCast Diabetes set - för längre användningstid | Small | 29-39 cm | 14-29 cm | 10,5 cm |
| 476440012 | VACOCast Diabetes set - för längre användningstid | Medium | 35-51 cm | 22-40 cm | 12 cm |
| 476440013 | VACOCast Diabetes set - för längre användningstid | Large | 40-58 cm | 30-45 cm | 13,5 cm |
| 476530011 | Extra polstring, tådel | Small | - | - | - |
| 476530012 | Extra polstring, tådel | Medium | - | - | - |
| 476530013 | Extra polstring, tådel | Large | - | - | - |
| 476570011 | Extra polstring | Small | - | - | - |
| 476570012 | Extra polstring | Medium | - | - | - |
| 476570013 | Extra polstring | Large | - | - | - |
| 476510000 | Extra innerfoder, vadvil | - | - | - | - |
| 476520000 | Extra innerfoder, ankelkil | - | - | - | - |