

VACOped

OPED VACOped är en gjuten, stabil funktionsortos för immobilisering av fot och fotled. VACOped har ett stort rörelseomfång och möjliggör en äkta Equinus-position för fot och fotled vid behandling av akillessenerupturer. Det har visat sig förkorta patientens återhämtningstid med ca 3,5 veckor.

OPED:s patenterade vakuumteknik är det moderna alternativet till gips. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger den skadade kroppsdel. När luften sugs ut ur kudden, med hjälp av en pump, blir den hård som ett gips. Vakuumkudden formar sig perfekt efter den enskilda patientens anatomi och kan justeras för att ta hänsyn till svullnad och atrofi.

Det erbjuds ett val av rörelseomfång (ROM) från -15° till +30°. Mycket anpassningsbar med endast 3 storlekar. Utbytbara inlägg för bättre hygien och komfort samt en avtagbar sula för enklare rengöring. Röntgengenomsläpplig.

Användningsområde

Konservativ och operativ akillessenereparation (ATR), dynamisk behandling av fotledsfrakturer, fotledsfrakturer, metatarsalfrakturer, akillessenerupturer, calcaneusfrakturer, svåra stukningar, proteser, artrodeser.

Mått

Skostorlek och/eller ankel-/vadamkrets samt framfotsbredd. Vid storleksgränserna mellan Small/Medium och Medium/Large-versionerna bör den mindre storleken av VACO®ped väljas om möjligt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets vad	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotlängd
476320011	VACOped	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476320012	VACOped	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476320013	VACOped	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476420011	VACOped set - för längre användningstid	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476420012	VACOped set - för längre användningstid	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476420013	VACOped set - för längre användningstid	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476500011	Dorsum tryckavlastande dyna	Small	-	-	-	-
476500012	Dorsum tryckavlastande dyna	Medium	-	-	-	-
476500013	Dorsum tryckavlastande dyna	Large	-	-	-	-
476550011	Akillessula 15-30 grader	Small	-	-	-	-
476550012	Akillessula 15-30 grader	Medium	-	-	-	-
476550013	Akillessula 15-30 grader	Large	-	-	-	-
476580011	Frottépolstring	Small	-	-	-	-
476580012	Frottépolstring	Medium	-	-	-	-
476580013	Frottépolstring	Large	-	-	-	-