

VACO[®]paso Free

Oped VACO[®]paso Free är en färdig behandlingssko för lindring vid fotrehabilitering och diabetiska fotsår. Den kan användas som nedtrappning efter TCC-behandling med VACO[®]cast Diabetic. Skon har ett uppbyggt tre-lagers sulsytem. Överst har du den justerbara VACO12-innersulan, fylld med små kulor, som kan anpassas optimalt efter fotens form. Fotens kontaktyta är maximal, vilket möjliggör optimal tryckfördelning. Tack vare det andra lagret av skummaterial, som delvis kan tas bort, kan ytterligare tryckavlastning ges på problemområden på foten. Längst ner har du en extremt styv sula som är mycket stabil och minimerar skjuvkrafter, samt ger fast stöd.

Skon har en yttersula med rullande form för en fysiologisk gångmönster, vilket gör att patienten kan stå säkert. Det innovativa hälstabilitetssystemet erbjuder optimalt stöd med så mycket utrymme som möjligt för foten och förband i hälen. Skon möjliggör enkel såromsorg, kardborrbanden kan öppnas helt smärtfritt för att placera foten. Lågt förvaringsbehov, kan bäras på höger eller vänster fot med ett reversibelt rem-system.

Användningsområde

Ulcerationer på foten, diabetiska fotsår, postoperativ vård efter tåamputationer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Fotlängd
476380010	VACOpaso Free	XS	24,5 cm
476380011	VACOpaso Free	S	26 cm
476380012	VACOpaso Free	M	27 cm
476380013	VACOpaso Free	L	28 cm
476380014	VACOpaso Free	XL	29,5 cm
476380015	VACOpaso Free	XXL	31 cm